

# NOWOŚCI I PROMOCJE

GC EUROPE N.V. PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE

## GABINET

Oferty ważne do 30 czerwca 2025



# Subtelne zmiany, piękny uśmiech

## Minimalnie inwazyjne odbudowy dla maksymalnego efektu estetycznego

Uśmiech sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, a śmiech sprawia, że jesteśmy zdrowi. Jednak znaczna liczba dorosłych jest niezadowolona z wyglądu swojego uśmiechu. Wpływa to niekorzystnie zarówno na ich samopoczucie, jak i relacje społeczne. Pomimo dużego zainteresowania kosmetycznym leczeniem stomatologicznym wiele osób rezygnuje

z szukania profesjonalnej pomocy. Barię często stanowią koszty i czasochłonność terapii. Odpowiedzią na potrzeby tych pacjentów mogłyby być subtelne zmiany, pozwalające uzyskać doskonały efekt estetyczny, jak ten przedstawiony w poniższym protokole pracy.

### 1. Identyfikacja:

Które przypadki mogą być kwalifikowane do tej metody leczenia?

Techniki adhezyjne pozwalają na minimalną ingerencję w naturalne tkanki zęba, są ekonomiczne oraz zapewniają natychmiastowy efekt i estetykę przy minimalnym dyskomforcie. Lekarze dentyści powinni jednak przyjąć holistyczne podejście, koncentrując się nie tylko na estetyce, ale także na zrozumieniu pierwotnych przyczyn problemu.

### 3. Metoda leczenia:

Minimalnie inwazyjna

#### Zamknięcie diastemy

- Harmonijny, symetryczny uśmiech
- Stabilizacja pozycji zębów



Pacjent postrzegał diastemę jako zaburzenie harmonii uśmiechu.



G-aenial A'CHORD jest przyjazny w kształtowaniu i modelowaniu.



Zęby z naturalną grą światła.  
Dzięki uprzejmości:  
Prof. dr Z. B. Kütük, Turcja

#### Zamknięcie czarnych trójkątów

- Bardziej młodszy wygląd
- Zapobiega zaleganiu resztek pokarmowych



Czarne trójkąty są szczególnie widoczne u pacjenta z wysoką linią uśmiechu.



G-aenial Universal Injectable może być aplikowany w sposób kontrolowany w wąskich przestrzeniach.



Niewidoczne i gładkie wypełnienia dla zdrowych dziąseł.  
Dzięki uprzejmości:  
Prof. dr Z. B. Korkut, Turcja

#### Odbudowa starcia

- Estetyczna korekta kształtu
- Poprawia stabilność okluzji i przywraca prowadzenie kłowe



Wraz ze ścieraniem brzegów siecznych, kształt siekaczy bocznych nadaje uśmiechowi niekorzystny wygląd.



Adaptacyjne odbijanie światła przez G-aenial A'CHORD wzmacnia stopień dopasowania i upraszcza wybór odcienia.



Niewidoczne połączenie i doskonałe dopasowanie uzupełnień.  
Dzięki uprzejmości:  
dr O. Bushati, Albania

#### Odbudowa ubytków klinowych

- Estetyczna korekta kształtu
- Zapobiega nadwrażliwości i ogranicza zaleganie płytki nazębnej na połączeniu szklwno-cementowym



Nieleczone ubytki klinowe mogą powodować nadwrażliwość, zaleganie płytki nazębnej i próchnicę.



Gładka powierzchnia uzyskana dzięki G-aenial A'CHORD jest gwarancją zdrowia dziąseł.



Niewidoczne uzupełnienia o doskonałym połysku  
Dzięki uprzejmości:  
dr R. Zunzarren, Francja

Nasza rekomendacja dotycząca systemu łączącego



G-Premio BOND

- ✓ Klinicznie potwierdzona skuteczność
- ✓ Cienka warstwa łącząca, żółty kolor zanika po utwardzeniu światłem
- ✓ Uniwersalny protokół pracy: może być stosowany ze wszystkimi trybami wytrawiania



#### 4. Postępowanie pozabiegowe

Zaleca się, aby pacjenci regularnie zgłaszali się do lekarza dentystry na wizyty kontrolne, a w razie potrzeby na powtórne polerowanie uzupełnień. Higiena jamy ustnej powinna być utrzymywana tak, jak dotychczas. Nie zaleca się stosowania produktów abrazyjnych. Pasta GC MI Paste Plus dostarcza fluor i minerały niezbędne do utrzymania prawidłowej równowagi jamy ustnej.

#### Nasze rekomendacje MI

#### GC MI Paste Plus



#### Nasze rekomendacje dotyczące materiałów kompozytowych



#### G-aenial A'CHORD

- ✓ Przyjazna, dostosowana do wskazań konsystencja
- ✓ Uproszczony dobór odcieni dzięki doskonałym właściwościom dopasowania się do otaczających tkanek zębów
- ✓ Szybkie polerowanie do wysokiego długotrwałego połysku
- ✓ Odpowiadająca naturalnej fluorescencja przyczynia się do uzyskania właściwego koloru w każdych warunkach oświetleniowych



Zmiana kształtu siekacza bocznego za pomocą G-aenial A'CHORD  
Dzięki uprzejmości: dr Giancarlo Pongione, Włochy




Odbudowa brzegów siecznych za pomocą G-aenial A'CHORD  
Dzięki uprzejmości: dr Urszula Witek-Furman, Polska



Odbudowa starcia brzegu siecznego i zamknięcie diastemy za pomocą G-aenial A'CHORD  
Dzięki uprzejmości: dr Aleksandra Ślaczan, Polska



Zmiana kształtu zębów i zamknięcie diastemy za pomocą G-aenial A'CHORD  
Dzięki uprzejmości: dr Andres Silva, Hiszpania

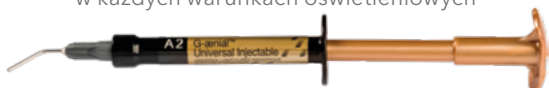

#### G-aenial Universal Injectable

- ✓ Wyjątkowa wytrzymałość i odporność na ścieranie
- ✓ 3 kroki w 1: kształtowanie i konturowanie podczas wstrzykiwania
- ✓ Łatwość polerowania do wysokiego długotrwałego połysku
- ✓ Dzięki łatwej kontroli aplikacji jest szczególnie wygodny do odbudowy mniejszych ubytków w obszarach o dużym obciążeniu



**G-Premio BOND**  
Światoutwardzalny jednoskładnikowy uniwersalny system łączący



**G-aenial A'CHORD**  
Zaawansowany uniwersalny kompozyt z prostą jednoodcieniową systemu



**G-aenial Universal Injectable**  
Wysokiej wytrzymałości kompozyt do odbudowy



**DIAPOLISHER PASTE**  
Diamentowa pasta polerska



**EPITEX**  
Paski do wykańczania i polerowania



**D-Light Pro**  
Lampa LED do polimeryzacji o dwóch długościach fali



**GC Composite Modeling Kit**  
Zestaw do modelowania uzupełnień kompozytowych



**GC MI Paste Plus**  
Biodostępny wapń i fosforan z fluorem

Optimalnie dostosowany  
do techniki IDS  
(Immediate Dentin Sealing)!

## G2-BOND Universal

Nowy standard 2-butelkowego uniwersalnego systemu łączącego. Produkt wytyczający nowy standard w Twoich rękach

G2-BOND Universal, dzięki opatentowanej technologii Dual-H, która zapewnia zaawansowane, zoptymalizowane połączenie zarówno z zębem, jak i kompozytem, jest uniwersalnym systemem 2-butelkowym, łączącym w sobie to, czego klinicyści oczekują od istniejących złotych standardów samowytrawiania (Self-Etch) oraz wytrawiania i płukania (Etch-and-Rinse), a nawet więcej:

- Możliwość wyboru preferowanego trybu wytrawiania
- Najwyższą trwałość i wytrzymałość wiązania
- Najwyższą odporność na przebarwienia brzeżne
- Doskonałe dozowanie i niską wrażliwość na technikę
- Szerokie zastosowanie
- Nowoczesną, inteligentną i ergonomiczną konstrukcję 1-PRIMER / 2-BOND

JUŻ TERAZ  
ZACZNIJ STOSOWAĆ

695 zł

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10006820  
**G2-BOND Universal Bottle Kit**  
Opakowanie zawiera: 1 x 1-PRIMER 5 ml,  
1 x 2-BOND 5 ml, akcesoria; **695 zł**



ZWYCI  
2!



Wytycza drogę do nowego standardu 2-butelkowego systemu łączącego we wszystkich trybach wytrawiania

Dla wszechstronnej satysfakcji i komfortu Twoich pacjentów!



Zredukowany kontakt między osłoną a butelką



Żebrowanie skonstruowane do skutecznego dociskania



- Wskazania:
- Bezpośrednie łączenie kompozytów
  - Naprawa wewnątrzustna
  - Natychmiastowe uszczelnienie zębiny (IDS)
  - Leczenie nadwrażliwości

- Leczenie odsłoniętych powierzchni korzeni
- Cementowanie uzupełnień pośrednich (z G-CEM LinkForce)
- Cementowanie wkładów i odbudowa zębów (z GRADIA CORE i G-Premio BOND DCA).

### Uniwersalne zastosowanie unikalnej kompozycji

- 4-MET dla niezawodnej adhezji do szkliwa i zębiny
- MDP dla doskonałej adhezji do szkliwa i zębiny, cyrkonu, tlenku glinu i metali nieszlachetnych
- MDTP do łączenia z metalami szlachetnymi
- System łączący bez HEMA dla potwierdzonej klinicznie wyjątkowej trwałości<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Van Dijken J, et al, Dent Mater. 2013.

Inne dostępne opakowania:  
Art. Nr 10006823 **G2-BOND Universal 1-PRIMER**  
uzupełnienie 1 x butelka 5 ml; **510 zł**

Art. Nr 10006824 **G2-BOND Universal 2-BOND**  
uzupełnienie 1 x butelka 5 ml; **215 zł**

ĘSKA

Nasze wydajne  
i niezawodne systemy wiążące  
do wszystkich codziennych  
wyzwań związanych z odbudową



## G-Premio BOND

Światłoutwardzalny, jednoskładnikowy uniwersalny system łączący do wszystkich technik łączenia, idealny do napraw i do stosowania przy nadwrażliwości!





### MIX MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH

**G-Premio BOND  
UZUPEŁNIENIE  
GRATIS!**

Zamów MIX 6 strzykawkę spośród:  
G-aenial Anterior & Posterior/G-aenial  
Universal Flo/G-aenial Flo X/ G-aenial  
A'CHORD/Essentia/everX Posterior/  
everX Flow w dowolnym odcieniu  
+ G-Premio BOND uzupełnienie  
**GRATIS!**

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem  
Biura GC na podstawie faktury  
jedenrazowego zakupu.  
Promocja obowiązuje przy zakupie  
minimum dwóch różnych materiałów  
kompozytowych.  
Oferta ważna po uzgodnieniu  
z Konsultantem GC.

- Doskonała adhezja do szkliwa i zębiny
- Optymalna konsystencja i zwilżalność
- Natychmiastowe uszczelnienie zębiny
- Do kompozytów, tlenku cyrkonu, tlenku glinu i metali,  
a także do wszystkich ceramiek szklanych (skaleniowych,  
wzmocnionych leucytem i na bazie dwukrzemianu litu)  
i do ceramiek hybrydowych w połączeniu z G-Multi PRIMER
- G-Premio BOND & G-Premio BOND DCA = mechanizm  
podwójnego utwardzania
- Redukcja przebarwień
- Mniej nadwrażliwości pozabiegowej
- Mniej czasochłonna i eliminująca straty materiału procedura

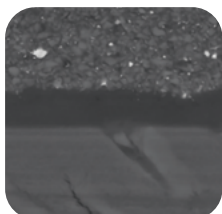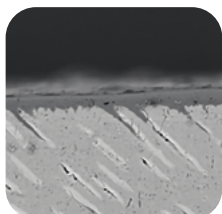

### G-Premio BOND OPAKOWANIE 3-BUTELKOWE

**G-AENIAL A'CHORD  
STRZYKAWKA lub AMPUŁKI  
UNITIP GRATIS!**

Zamów 1 x G-Premio BOND opakowanie  
3-butelkowe  
+ 1 x strzykawka lub 1 x opakowanie  
ampułek Unitip G-aenial A'CHORD  
w odcieniu A2 lub A3 **GRATIS!**

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem  
Biura GC na podstawie faktury  
jedenrazowego zakupu.  
Oferta ważna po uzgodnieniu  
z Konsultantem GC.

### KORZYSTNA CENA

**G-Premio BOND  
OPAKOWANIE 3-BUTELKOWE**

**955 zł**

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10001460

**G-Premio BOND opakowanie 3-butelkowe**  
3 butelki po 5 ml; **955 zł**

### G-Premio BOND UZUPEŁNIENIE

**375 zł**

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10001462

**G-Premio BOND uzupełnienie**  
1 butelka 5 ml; **375 zł**



### ZAMKNIĘCIE FLIP-TOP

**300 aplikacji na jedną butelkę 5 ml**

Korzystaj z wysokiej wydajności,  
odkrywając jednocześnie łatwiejsze  
użytkowanie

Jako opcja:



G-Premio BOND DCA  
= aktywator podwójnego  
utwardzania

Dostępne opakowania:

Art. Nr 10001462 **G-Premio BOND uzupełnienie**

1 butelka 5 ml; **375 zł**

Art. Nr 10001459 **G-Premio BOND Kit**

1 butelka 5 ml, akcesoria; **470 zł**

Art. Nr 10001460 **G-Premio BOND**

**opakowanie 3-butelkowe**

3 butelki po 5 ml; **955 zł**

Art. Nr 10001243 **G-Premio BOND Unit Dose**

50 jednostkowych ampułek (0,1 ml),

akcesoria; **505 zł**

Art. Nr 10001349 **G-Premio BOND DCA**

1 butelka 3 ml aktywatora Dual Cure (DCA); **210 zł**

## G-ænia™ A'CHORD

Zaawansowany uniwersalny kompozyt z prostotą jednodocieniowego systemu

Prostota, estetyka i efektywność w Twoich rękach

### Rewolucyjna technologia A'CHORD

- chroniony patentem wypełniacz i powłoka
- wysoka odporność na przebarwienia i ścieranie
- doskonały kontrast na zdjęciach rtg

### Prostota A'CHORD


- uproszczony system jednodocieniowy
- uproszczona procedura postępowania
- po prostu uniwersalny

### Estetyka A'CHORD

- naturalna fluorescencja
- długotrwały połysk
- ekstremalne wyzwania



Przed polerowaniem | Po polerowaniu

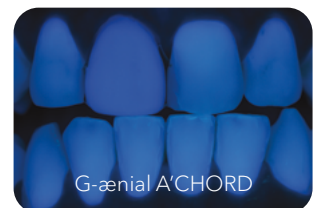

G-ænia A'CHORD



Konwencjonalna licówka kompozytowa

© Dr J. Tapia Guadix, Hiszpania

### Przewodnik „Restorative Dentistry Guide” z GC

Przewodnik przedstawia wizualizację 3D wszystkich typów ubytków i pokazuje metody ich odbudowy za pomocą zaawansowanych cementów glasonomerowych, szklanych hybryd GC i/lub materiałów kompozytowych.



RESTORATIVE SOLUTIONS

Więcej informacji można znaleźć w naszym przewodniku Restorative Guide lub w aplikacji!



## DIAPOLISHER PASTE

Diamentowa pasta polerska



Art. Nr 10000892  
DIAPOLISHER PASTE

Opakowanie zawiera: DIAPOLISHER PASTE strzykawka 2 g, 1 x końcówka dozująca (typu igła), 1 x ochronna nasadka; 210 zł



Zeskanuj, aby przejść do strony internetowej G-aenial A'CHORD

G-AENIAL A'CHORD  
DIAPOLISHER PASTE  
GC COMPOSITE MODELING KIT



Zeskanuj, aby obejrzeć filmy wideo

**KORZYSTNA CENA**

G-aenial A'CHORD Value Kit STRZYKAWKI

~~1340 zł~~ **1 200 zł**

Art. Nr 10006916

**G-aenial A'CHORD Value Kit Strzykawki**

Zestaw zawiera:

4 strzykawki (2,1 ml/4 g), 2 x A2, 2 x A3,  
1 x butelka G-Premio BOND 5 ml, akcesoria;  
Cena zestawu: **1 200 zł**



**KORZYSTNA CENA**

**4 + 1**  
**10 + 3**

**235 zł**

Cena jednej strzykawki

Zamów 4 strzykawki G-aenial A'CHORD

w dowolnym odcieniu

+ 1 strzykawka G-aenial A'CHORD A2 lub A3 GRATIS!<sup>1</sup>

Zamów 10 strzykawek G-aenial A'CHORD

w dowolnym odcieniu

+ 3 strzykawki G-aenial A'CHORD A2 lub A3 GRATIS!<sup>1</sup>

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC

na podstawie faktury jednorazowego zakupu.

Promocja dostępna również dla G-aenial A'CHORD

Ampułki Unitip. Promocja obowiązuje po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

**6 X G-AENIAL A'CHORD STRZYKAWKI**

**G-Premio BOND UZUPEŁNIENIE GRATIS!**

Zamów 6 strzykawek G-aenial A'CHORD

w dowolnym odcieniu

+ G-Premio BOND uzupełnienie GRATIS!<sup>1</sup>


<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC

na podstawie faktury jednorazowego zakupu.

Promocja dostępna również dla G-aenial A'CHORD

Ampułki Unitip. Promocja obowiązuje po uzgodnieniu

z Konsultantem GC.

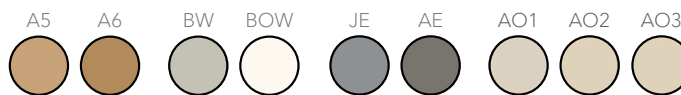

**GC COMPOSITE MODELING KIT**

Zestaw do modelowania materiałów kompozytowych do uzupełnień bezpośrednich

**STRZYKAWKI**

Art. Nr 10006835

**G-aenial A'CHORD Layering Kit**

Zestaw zawiera: 5 strzykawkę (2,1 ml/4 g) po jednej w odcieniu: A2, A3, AO2, AE, JE  
Cena zestawu: **1 055 zł**

Art. Nr 10006836

**G-aenial A'CHORD Core Kit**

Zestaw zawiera: 5 strzykawkę (2,1 ml/4 g) po jednej w odcieniu: A1, A2, A3, A3.5, A4  
Cena zestawu: **1 055 zł**

Art. Nr 10006837

**G-aenial A'CHORD Trial Kit A**

Zestaw zawiera: 3 strzykawki (2,1 ml/4 g) 2 x A2, 1 x A3  
Cena zestawu: **635 zł**

Art. Nr 10006771

**G-aenial A'CHORD Bleach Kit**

Zestaw zawiera: 3 strzykawkę (2,1 ml/4 g) po jednej w odcieniu: BW, BOW, JE  
Cena zestawu: **635 zł**

**Strzykawki uzupełnienie**

1 strzykawka (2,1 ml/4 g)

Odcienie standardowe:

A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6;

Odcienie opakowe: AO1, AO2, AO3;

Odcienie szklawne: JE, AE;

Odcienie wybielone: BW, BOW;

Cena jednej strzykawki: **235 zł**



Art. Nr 10003388

**GC Composite Modeling Kit**

Zestaw zawiera: 1x 6 ml GC Modeling Liquid płyn do modelowania, 5 x pędzelek płaski - Gradia Brush Flat, 5 x pędzelek okrągły - Gradia Brush Round, 2 x uchwyt do pędzelków Gradia, bloczki do mieszania;  
Cena zestawu: **370 zł**



# G-ænial Universal Injectable

Wysokiej wytrzymałości kompozyt do odbudowy

Zoptymalizuj swój sposób pracy!

Innowacyjna konstrukcja zapewnia łatwą aplikację bez efektu spływania. Dzięki bezproblemowemu dozowaniu i łatwej aplikacji materiału nasze strzykawki i ampułki unitip są przyjazne w użyciu.



- Ultradrobne cząstki szkła barowego (150 µm)
- Wysoka zawartość wypełniacza
- Technologia pełnego pokrycia powłoką silanową (FSC) poprawia: dyspersję i adhezję wypełniaczy w matrycy
- Bez kleistości
- Mała siła przy wyciskaniu
- Wysoki kontrast na zdjęciach rtg




Zeskanuj, aby obejrzeć filmy wideo



Nieźrówna polerowalność z wyjątkową estetyką

Uniwersalne zastosowanie do wszystkich klas ubytków

Szybsza aplikacja bez strat materiału

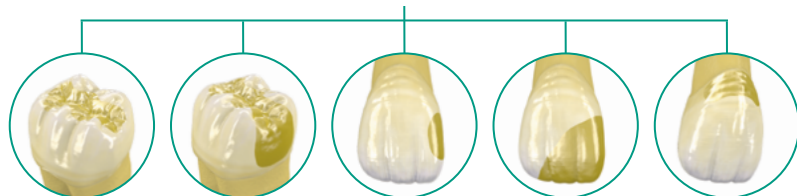

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

## KORZYSTNA CENA


G-ænial Universal Injectable + G-Premio BOND

~~870 zł~~ **750 zł**

Art. Nr 10003741

**G-ænial Universal Injectable + G-Premio BOND**

Zestaw zawiera: 3 strzykawki (1 ml/1,7 g), po jednej w odcieniu A1, A2 i A3; 1 x butelka G-Premio BOND 5 ml; Cena zestawu: **750 zł**

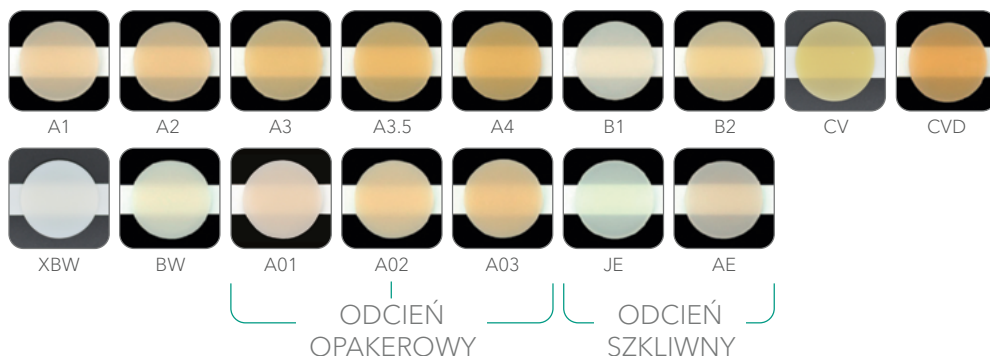

ODCIEŃ OPAKEROWY

ODCIEŃ SZKLIWNY



Wyjątkowa wytrzymałość i odporność na ścieranie

3 kroki w 1 - odbudowa, kształtowanie i konturowanie podczas wstrzykiwania

**G-ænial Universal Injectable** strzykawka 1 ml (1,7 g); Cena jednej strzykawki: **175 zł**

**G-ænial Universal Injectable** ampułki Unitip 15 x 0,16 ml (0,27 g); Cena jednego opakowania: **265 zł**

Art. Nr 10003703 **XBW**  
Art. Nr 10003704 **BW**  
Art. Nr 10003705 **A1**  
Art. Nr 10003706 **A2**  
Art. Nr 10003707 **A3**  
Art. Nr 10003708 **A3,5**

Art. Nr 10003709 **A4**  
Art. Nr 10003710 **B1**  
Art. Nr 10003711 **B2**  
Art. Nr 10003712 **CV**  
Art. Nr 10003713 **CVD**  
Art. Nr 10003714 **AO1**

Art. Nr 10003715 **AO2**  
Art. Nr 10003716 **AO3**  
Art. Nr 10003717 **JE**  
Art. Nr 10003718 **AE**

Art. Nr 10006910 **XBW**  
Art. Nr 10006911 **BW**  
Art. Nr 10006896 **A1**  
Art. Nr 10006897 **A2**  
Art. Nr 10006898 **A3**  
Art. Nr 10006899 **A3,5**

Art. Nr 10006900 **A4**  
Art. Nr 10006901 **B1**  
Art. Nr 10006902 **B2**  
Art. Nr 10006903 **CV**  
Art. Nr 10006904 **CVD**  
Art. Nr 10006905 **AO1**

Art. Nr 10006906 **AO2**  
Art. Nr 10006907 **AO3**  
Art. Nr 10006908 **JE**  
Art. Nr 10006909 **AE**



## D-Light® Pro

Zobacz więcej niż może dostrzec oko  
Lampa LED do polimeryzacji o dwóch długościach fali,  
z możliwością sterylizacji w autoklawie i trybem detekcji

### Utwardzanie

- Tryb HP – wysokiej mocy 1400 mW/cm<sup>2</sup>
  - Niebieska dioda LED emitująca światło o długości fali od 460 do 465 nm
  - Fioletowa dioda LED emitująca światło o długości fali od 400 do 405 nm
  - Skuteczna polimeryzacja innych dostępnych na rynku fotoinicjatorów
- Ochrona**
- Tryb LP – niskiej mocy, przy zredukowanej mocy wyjściowej 700 mW/cm<sup>2</sup>, np. w przypadku głębokich ubytków, gdy obszar preparacji znajduje się w pobliżu mięszi

### Wykrywanie

- Tryb DT – detekcji, wykorzystuje tylko światło bliskie ultrafioletu
- Wizualizacja płytki nazębnej
- Wizualizacja zainfekowanej zębiny
- Wizualizacja mikroprzecieków
- Ocena aktywności bakterii w bruzdach
- Wizualizacja materiałów fluorescencyjnych
- Ocena głębokości pęknięć



**PRODUKTY GC  
DO WYBORU**

**D-light Pro GRATIS!**

Zamów produkty GC (G-æniał Family, Essentia, everX Flow, EQUIA Forte HT, CERASMART270 lub Initial LiSi Block) o wartości co najmniej 16 000 zł + D-Light Pro GRATIS<sup>1</sup>!

Możliwość indywidualnej, dopasowanej do potrzeb gabinetu konfiguracji zestawu produktów po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

### Sterylizacja w autoklawie



### KORZYSTNA CENA

5 190 zł

~~6 400 zł~~



Art. Nr 70000008 **D-Light Pro; 5 190 zł**

Zawiera: rękojeść i moduł elektroniczny, światłowód (8 mm) baterie akumulatorowe (2 szt.), stację ładującą, zasilacz, adapter EU/UK, osłonę chroniącą przed światłem, miękkie osłony oczu (3 szt.)


### Zobacz zmiany niewidzialne gołym okiem




Wizualizacja płytki nazębnej

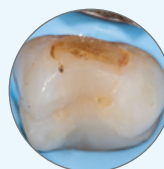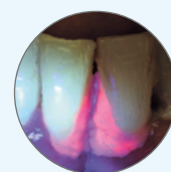

Wizualizacja mikroprzecieków

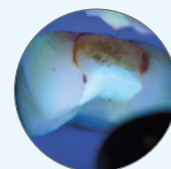

Wizualizacja wypełnień i nadmiaru cementu

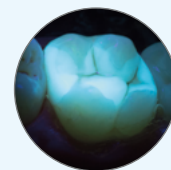

Ocena głębokości pęknięć



# GC MI Paste Plus® & GC Tooth Mousse®

Remineralizujące kremy ochronne do zębów o potrójnym działaniu: wzmacniają, chronią, uzupełniają.



## Tooth Mousse czy MI Paste Plus?

Tooth Mousse i MI Paste Plus mogą być stosowane do tych samych wskazań. Tooth Mousse jest zalecany u dzieci w wieku poniżej 6 lat w celu uniknięcia ryzyka fluorozoy. Ponadto produkt nadaje się również do przypadków, w których nie jest wymagana ani pożądana suplementacja fluorkowa. Do stosowania na noc Tooth Mousse zaleca się do 12. roku życia. MI Paste Plus można stosować od tego wieku.

## GC MI Paste Plus & GC Tooth Mousse

- Pierwsze, wypróbowane i przetestowane miliony razy kremy ochronne do zębów z opatentowanym kompleksem aktywnym RECALDENT™
- Zaopatrują zęby w niezbędną ilość wapnia, fosforu i fluoru\*
- Eliminują nadwrażliwość
- Idealne zdrowie zębów, stała ochrona, wzmocnienie i regeneracja
- Działają szybko i skutecznie
- Bezczukrowa ochrona zębów

\* MI Paste Plus zawiera dodatkowo 900 ppm fluoru

### GC Tooth Mousse: Opakowanie 10 sztuk

Art. Nr 10001759 Mięta  
Art. Nr 10001757 Truskawka  
Art. Nr 10001758 Melon  
Art. Nr 10001756 Wanilia  
Art. Nr 10001760 Tutti-Frutti  
Cena jednego opakowania: **750 zł**



### GC MI Paste Plus: Opakowanie 10 sztuk

Art. Nr 10001762 Mięta  
Art. Nr 10001763 Truskawka  
Art. Nr 10001764 Melon  
Art. Nr 10001765 Wanilia  
Art. Nr 10001766 Tutti-Frutti  
Cena jednego opakowania: **840 zł**



CPP-ACPF (fosfopeptyd kazeiny oraz amorficzny fosforan wapnia i fluor) został opracowany przez School of Dental Science na University of Melbourne Victoria w Australii. RECALDENT™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym na licencji RECALDENT™ Pty. Ltd. RECALDENT™ CPP-ACP pochodzi z białka mleka. Nie należy go stosować u pacjentów z alergią na białka mleka i hydroksybenzoesan.

## MI Varnish™

MI Varnish zawiera 22 600 ppm fluoru, jak również RECALDENT (CPP-ACP) i jest przeznaczony do aplikacji w gabinecie. Szybko przylega do zębów, nie zbrylając się i służy jako rezerwuuar minerałów i fluoru. RECALDENT (CPP-ACP) i fluor działają synergicznie: gdy RECALDENT (CPP-ACP) wchodzi w kontakt z fluorem, stabilizuje jony fluorkowe, tworząc idealne źródło do budowy bardziej odpornego na kwasy fluorapatytu.



Art. Nr 10003389  
**MI Varnish Zestaw Intro**  
Zestaw zawiera: 10 pojedynczych dawek (0,4 ml)  
MI Varnish (5 x Truskawka + 5 x Mięta), 20 mikropędzelków;  
Cena jednego opakowania: **120 zł**

Art. Nr 10003390  
**MI Varnish Opakowanie uzupełniające**, smak truskawki  
Art. Nr 10003391  
**MI Varnish Opakowanie uzupełniające**, smak mięty  
Opakowanie zawiera: 35 pojedynczych dawek (0,4 ml)  
MI Varnish, 50 mikropędzelków;  
Cena jednego opakowania: **365 zł**

Art. Nr 10003392  
**MI Varnish Opakowanie kliniczne**, smak truskawki  
Art. Nr 10003393  
**MI Varnish Opakowanie kliniczne**, smak mięty  
Opakowanie zawiera:  
100 pojedynczych dawek (0,4 ml)  
MI Varnish, 100 mikropędzelków;  
Cena jednego opakowania: **840 zł**

## KORZYSTNA CENA

ZESTAW PROMO

5 + 1

420 zł

Cena zestawu

Art. Nr 10003278

**Zestaw Promo GC Tooth Mousse**

Zestaw zawiera: 5 tub GC Tooth Mousse (smak: miętowy, melonowy, waniliowy, tutti-frutti, truskawkowy)

**+ 1 tuba GC Tooth Mousse** o smaku truskawki

Dodatkowy produkt jest już zawarty w zestawie.



## KORZYSTNA CENA

ZESTAW PROMO

5 + 1

460 zł

Cena zestawu

Art. Nr 10003277

**Zestaw Promo GC MI Paste Plus**

Zestaw zawiera: 5 tub GC MI Paste Plus

(smak: miętowy, melonowy, waniliowy, tutti-frutti, truskawkowy)

**+ 1 tuba GC MI Paste Plus** o smaku miętowym

Dodatkowy produkt jest już zawarty w zestawie.



Globalny problem, który dotyka co siódme dziecko. Rozwiązania terapeutyczne z GC w leczeniu hipomineralizacji trzonowcowo-siekaczkowej



## Więcej o MIH

Dalsze informacje, obraz kliniczny, objawy, rozwiązania terapeutyczne z GC można znaleźć tutaj:



## EPITEX

## Paski z tworzywa sztucznego do wykańczania i polerowania

Łatwe wykańczanie i polerowanie przestrzeni międzyzębowych, przeznaczone do wypełnień gipsjonomerowych i kompozytowych.

- Wyjątkowo cienkie i elastyczne, bardzo odporne na rozerwania
- Dostosowane do bardzo wąskich przestrzeni międzyzębowych
- Bardzo wytrzymałe
- Cząstki ściernie wtopione w powierzchnię podłoża
- Cztery rodzaje nasypu
- Praktyczny dyspenser do pasków
- Dostępne również jako paski do formówek



Art. Nr 10000117

**EPITEX Starter Kit**

Zestaw zawiera: Stojak z dyspenserami pasków po 10 m we wszystkich dostępnych rodzajach ziarnistości (gruboziarniste-niebieskie, średnioziarniste-zielone, drobnoziarniste-szare, extra drobnoziarniste-czerwone, przezroczyste)

Uzupełnienia

Pojedyncze opakowanie zawiera 10 m paska w jednej ziarnistości.

Art. Nr 10000122 **EPITEX Refill, Translucent Matrix** (przezroczysty)Art. Nr 10000118 **EPITEX Refill, Coarse** (gruboziarnisty-niebieski)Art. Nr 10000120 **EPITEX Refill, Medium** (średnioziarnisty-zielony)Art. Nr 10000119 **EPITEX Refill, Fine** (drobnoziarnisty-szary)Art. Nr 10000121 **EPITEX Refill, X-Fine** (ekstra drobnoziarnisty-czerwony)

Cena opakowania: 150 zł



# G-æniał

Uniwersalny kompozyt do niewidocznych uzupełnień z systemem doboru koloru dostosowanym do wieku



Zeskanuj, aby obejrzeć filmy wideo



G-æniał Anterior oferuje

- Estetykę i kontrast w obrazie rtg
- Wszechstronność w stosowaniu
- System odcieni dostosowany do wieku pacjenta
- Bezproblemową pracę

G-æniał Posterior oferuje

- Doskonałą estetykę przy użyciu pojedynczego odcienia
- Optymalną nieprzepuszczalność dla promieni rtg
- Nie klejącą się, umożliwiającą kondensację konsystencję
- Doskonałą wytrzymałość i trwałość

## ODCIEŃ STANDARDOWE



## ODCIEŃ OPAKOWE



## ODCIEŃ SZKLIWNE



## PROMOCJA STRZYKAWKI

4 + 1

10 + 3

220 zł

Cena jednej strzykawki

6 x G-æniał Anterior/Posterior  
STRZYKAWKI

G-Premio BOND  
UZUPEŁNIENIE GRATIS!

Zamów 6 strzykawek G-æniał Anterior/Posterior w dowolnym odcieniu + G-Premio BOND uzupełnienie GRATIS!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Promocja dostępna również dla G-æniał Anterior/Posterior Ampułki Unitip. Promocja obowiązuje po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



Zamów 4 strzykawki G-æniał Anterior/Posterior w dowolnym odcieniu + 1 strzykawka G-æniał A2 lub P-A2 GRATIS!

Zamów 10 strzykawek G-æniał Anterior/Posterior w dowolnym odcieniu + 3 strzykawki G-æniał A2 lub P-A2 GRATIS!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Promocja dostępna również dla G-æniał Anterior/Posterior Ampułki Unitip. Promocja obowiązuje po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Art. Nr 10000966 **strzykawka A2**  
Art. Nr 10000967 **strzykawka A3**  
Art. Nr 10000987 **strzykawka P-A2**  
Art. Nr 10000988 **strzykawka P-A3**

Odcienie: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, SE, IE, TE, CVE, XBW, BW, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3,5, P-JE i P-IE

## G-æniel Flo X

### Idealny partner do wszystkich odbudów w odcinku bocznym!

G-æniel Flo X zawiera równomiernie rozmieszczone, ultra-drobne cząstki wypełniacza (wypełniacz ze szkła barowego) i wyróżnia się niską lepkością, a w szczególności bardzo dobrym kontrastem obrazu rtg (300% Al przy warstwie 1 mm, 284% Al przy warstwie grubości 0,5 mm), co między innymi ułatwia diagnozowanie próchnicy wtórnej.



#### MIX MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH

#### + G-Premio BOND UZUPEŁNIENIE GRATIS!

Zamów MIX 6 strzykawkę spośród:  
G-æniel Anterior & Posterior/G-æniel  
Universal Flo/G-æniel Flo X/ G-æniel  
A'CHORD/Essentia/everX Posterior/  
everX Flow w dowolnym odcieniu  
+ G-Premio BOND uzupełnienie  
GRATIS!\*

Art. Nr 10003370 **G-æniel Flo X A2; 250 zł**  
Art. Nr 10003371 **G-æniel Flo X A3; 250 zł**

Opakowanie zawiera: Strzykawka 2 ml (3,6 g); 20 końcówek aplikacyjnych Dispensing Tip III z tworzywa; 1 osłona chroniąca przed światłem  
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, CV, AO2 i AO3

\* GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Promocja obowiązuje przy zakupie minimum dwóch różnych materiałów kompozytowych.  
Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



## G-æniel Universal Injectable

### Kompozyt o wysokiej wytrzymałości do odbudowy ubytków Płynna konsystencja - długotrwała wytrzymałość

G-æniel Universal Injectable jest uniwersalnym kompozytem odtwórczym o wyjątkowej wytrzymałości i trwałości dla długotrwałych uzupełnień estetycznych. Wysoka zawartość ultra-drobnych cząstek szkła barowego i technologia pełnego pokrycia powłoką silanu (FSC) dają G-æniel Universal Injectable niezwykłą wytrzymałość - wyższą niż wiodące, dostępne na rynku kompozyty typu pasta.



Art. Nr 10003722 **G-æniel Universal Injectable A2; 175 zł**  
Art. Nr 10003723 **G-æniel Universal Injectable A3; 175 zł**

Opakowanie zawiera: Strzykawka 1 ml (1,7 g), 10 końcówek aplikacyjnych typu długa igła, 1 osłona chroniąca przed światłem  
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, CV, CVD, XBW, BW, AO1, AO2, AO3, JE, AE



Więcej informacji  
na temat produktu  
można znaleźć  
na stronie 8.

## G-æniel Universal Flo

### Płynny i w pełni uniwersalny do wszystkich klas ubytków

Ze względu na wyjątkową płynność G-æniel Universal Flo może być stosowany jak płynny, a jest tak samo stabilny, jak konwencjonalny kompozyt. Nadaje się do wszystkich klas ubytków i odznacza się doskonałą wytrzymałością, polerowalnością i wszechstronnością.



#### KORZYSTNA CENA

4 + 1 | 10 + 3

230 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 4 strzykawki G-æniel Universal Flo w dowolnym odcieniu  
+ 1 strzykawka G-æniel Universal Flo A2 lub A3 GRATIS!\*

Zamów 10 strzykawkę G-æniel Universal Flo w dowolnym odcieniu  
+ 3 strzykawki G-æniel Universal Flo A2 lub A3 GRATIS!\*

Art. Nr 10000916 **G-æniel Universal Flo A2; 230 zł**  
Art. Nr 10000917 **G-æniel Universal Flo A3; 230 zł**

Opakowanie zawiera: Strzykawka 2 ml, (3,4 g); 20 końcówek aplikacyjnych Dispensing Tip III z tworzywa, 1 osłona chroniąca przed światłem  
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, BW, CV, AO2, AO3, JE, AE

\* GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.  
Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



## everX Flow®

Wzmocniony krótkimi włóknami kompozyt płynny do obudowy zębiny



Zeskanuj, aby obejrzeć filmy wideo



### Absolutnie stabilna struktura

everX Flow to nowe rozwiązanie GC do trwałego i nieskomplikowanego wzmocnienia wszystkich Twoich uzupełnień. Dzięki łatwości użycia, dwóm kolorom i wyjątkowej wytrzymałości, everX Flow szybko stanie się Twoim nowym produktem numer 1 do wszystkich uzupełnień wymagających stabilnej struktury. Odcień „Bulk” o głębokości utwardzania 5,5 mm jest idealny do głębokich ubytków zębów bocznych, podczas gdy odcień „Dentin” o głębokości utwardzania 2,0 mm - materiałem z wyboru zapewniającym uzyskanie znakomitych rezultatów estetycznych.

### KORZYSTNA CENA

4 + 1  
10 + 3

240 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 4 strzykawki everX Flow w dowolnym odcieniu + 1 strzykawka everX Flow Bulk lub Dentin GRATIS!  
Zamów 10 strzykawk everX Flow w dowolnym odcieniu + 3 strzykawki everX Flow Bulk lub Dentin GRATIS!

Art. Nr 10001490 **everX Flow Bulk; 240 zł**  
Strzykawka 2 ml (3,7 g) Bulk, 20 końcówek aplikacyjnych Dispensing Tip III z tworzywa, osłona chroniąca przed światłem

Art. Nr 10001491 **everX Flow Dentin; 240 zł**  
Strzykawka 2 ml (3,7 g) Dentin, 20 końcówek aplikacyjnych Dispensing Tip III z tworzywa, osłona chroniąca przed światłem

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

### KORZYSTNA CENA

everX Flow + G-ænial Universal Injectable

680 zł

~~890 zł~~  
Cena zestawu



Art. Nr 10004834 **everX Flow + G-ænial Universal Injectable**  
Zestaw zawiera: 2 x strzykawka everX Flow (1 x Bulk, 1 x Dentin) 2 x strzykawka G-ænial Universal Injectable (1 x A2, 1 x A3), akcesoria

ODCIEŃ BULK, O GŁĘBOKOŚCI UTWARDZANIA DO 5,5 MM, OPTIMALNY DO ROZLEGŁYCH UBYTKÓW!

## everX Posterior®

Wzmocniona włóknem szklanym kompozytowa podbudowa do dużych ubytków

Art. Nr 10001049 **everX Posterior; 360 zł**  
Zawiera: 15 ampułek unitip x 0,13 ml (0,25 g)

Art. Nr 10001149 **everX Posterior; 1 090 zł**  
Zawiera: 50 ampułek unitip x 0,13 ml (0,25 g)



Jesteś zainteresowany odbudową metodą iniekcji?

Skontaktuj się z Konsultantem GC, aby uzyskać więcej informacji.

## Odbudowa metodą iniekcji

Wstrzykuj nasz najmocniejszy materiał do odbudowy bezpośrednio!



Zobacz odbudowę metodą iniekcji kompozytu

Odbudowa metodą iniekcji z użyciem EXACLEAR i G-ænial Universal Injectable dr Serhat Köken

## G-ænial Universal Injectable

Odbudowa, kształtowanie i konturowanie podczas wstrzykiwania

- Ultradrobny wypełniacz (150 µm)
- Wysoka zawartość wypełniacza
- Technologia pełnego pokrycia powłoką silanową (FSC) poprawia: dyspersję i adhezję wypełniaczy w matrycy
- Bez kleistości
- Mała siła przy wyciskaniu
- Wysoki kontrast na zdjęciach rtg



## G-Premio BOND

Światłoutwardzalny uniwersalny system łączący



Więcej informacji na temat produktu można znaleźć na stronie 5.

## EXACLEAR

Transparentny materiał poliwinylsiloksanowy

- Wysoka przezroczystość umożliwia dokładną kontrolę wzrokową
- Skuteczne utwardzanie światłem dzięki doskonałej przezroczystości
- Optymalna konsystencja umożliwiająca łatwe umieszczenie w łożysce wyciskowej
- Dobre odwzorowanie, optymalna stabilność i odporność na rozerwanie podczas aplikacji

Idealny do:

- Techniki formowania metodą iniekcji: łatwa kontrola podczas wstrzykiwania i skuteczne utwardzanie światłem

KORZYSTNA CENA

10 + 3

325 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 10 opakowań EXACLEAR + 3 opakowania EXACLEAR GRATIS!

Art. Nr 10001483 **EXACLEAR; 325 zł**  
Opakowanie zawiera: 2 naboje (48 ml), 6 końcówek mieszających II L

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



KORZYSTNA CENA

615 zł

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10003753 **Injection Moulding Kit; 615 zł**  
Opakowanie zawiera: 3 strzykawki (1 ml/1,7 g) G-ænial Universal Injectable po jednej w odcieniu A1, A2, A3; 1 nabój (48 ml) EXACLEAR; 3 końcówki mieszające II L.





WYSOKIEJ  
WYTRZYMAŁOŚCI  
KOMPOZYT  
INIEKCYJNY  
DO ODBUDOWY

SZKLANO-HYBRYDOWY  
DŁUGOCZASOWY  
SYSTEM ODTWÓRCZY  
TYPU BULK FILL

WZMOCNIONY  
KRÓTKIMI  
WŁÓKNAMI  
KOMPOZYT  
PŁYNNY DO  
ODBUDOWY  
ZĘBINY

### G-aenial Universal Injectable

Najbardziej tiksotropowy  
i wszechstronny materiał

### EQUIA Forte HT

Materiał najbardziej  
odporny na wilgoć

### everX Flow

Najmocniejszy materiał  
do odbudowy zębiny



- Iniekcyjna lepkość: pozostaje w miejscu aplikacji, ale dostosowuje się do każdego ubytku
- Jeden materiał do wszystkich ubytków (nawet narażonych na duże obciążenia), bez warstwy pokrywającej

#### Wysoka odporność na zużycie

- Oparty na technologii FSC: doskonała dyspersja i adhezja wypełniaczy w matrycy
- Długotrwała wytrzymałość

#### Estetyczne uzupełnienia

- Uzyskane przy krótkim czasie polerowania
- Optymalne utrzymanie połysku
- Szeroka gama odcieni

- Idealny do stosowania, gdy izolacja jest trudna do uzyskania
- Chemiczna adhezja eliminująca potrzebę stosowania dodatkowego systemu łączącego
- Minimalnie inwazyjny, ponieważ usuwana jest tylko zainfekowana zębina

#### Doskonały długoczasowy wskaźnik skuteczności, nawet w przypadku wypełnień narażonych na przeciążenia zgryzowe

- Dzięki bardzo odpornej warstwie pokrywającej
- EQUIA Forte HT to niezawodny system do długoczasowych wypełnień oparty na 12-letnim doświadczeniu klinicznym z systemem EQUIA

#### Aplikacja typu bulk fill zapewnia szybką i łatwą procedurę

- Brak ograniczeń głębokości utwardzania
- Praktycznie brak skurczu z uwagi na brak monomerów żywicy
- Niska wrażliwość na technikę pracy

- Efekt wzmacniająco włókien
- Doskonała odporność na pękanie
- Optymalny do rozległych ubytków lub ubytków w zębach z mikropęknięciami

#### Łatwa aplikacja typu bulk fill

- Odcień Bulk umożliwia utwardzanie warstw o głębokości do 5,5 mm
- Płynna konsystencja dla idealnej adaptacji do ubytku

#### Przystępne rozwiązanie dla pacjentów

- Umożliwia wykonanie odbudowy bezpośredniej tam, gdzie wskazana byłaby odbudowa pośrednia

## ZMIANA W ŚRODOWISKU STOMATOLOGICZNYM

### Jakie kryteria należy wziąć pod uwagę przy wyborze alternatywnego materiału?

Ilość stosowanego na całym świecie amalgamatu dentystycznego zmniejsza się. Konwencja z Minamata wyznaczyła kierunek stopniowego wycofywania amalgamatu z użycia jako materiału wypełnieniowego w celu wyeliminowania uwalniania rtęci do środowiska. Alternatywne rozwiązania do uzupełnień bezpośrednich uległy znacznemu udoskonaleniu na przestrzeni ostatnich lat, ale nadal mają pewne ograniczenia. Odpowiednia wiedza na temat tych ograniczeń ma kluczowe znaczenie dla właściwego doboru materiału i optymalnej opieki nad pacjentem.



Skontaktuj się z Konsultantem GC  
i poproś o darmową próbkę EQUIA Forte HT.

ALTERNATYWY  
DLA AMALGAMATU  
EQUIA FORTE HT



## EQUIA Forte™ HT

Najnowszy szklano-hybrydowy system odtwórczy typu bulk fill  
- Twój niezawodny partner przy odbudowie zębów bocznych

- Zwiększona przezierność
- Eliminuje zakładanie koferdamu i stosowanie systemu łączącego
- Doskonała biokompatybilność
- Mocniejszy i nieklejący się materiał, idealny do aplikacji typu bulk fill
- Prosta, zaledwie kilkuetapowa procedura odbudowy zębów bocznych - bez konieczności absolutnej izolacji
- Odbudowa wrażliwych, dotkniętych hipomineralizacją zębów (MIH) u młodych pacjentów



Zeskanuj,  
aby obejrzeć  
filmy wideo

### WSKAZANIA

- Wypełnienia ubytków klasy I/ ostateczne
- Narażone na przeciążenia zgryzowe wypełnienia ubytków klasy II/ostateczne
- Pośrednie wypełnienia długoczasowe
- Wypełnienia ubytków klasy V i w obrębie cementu korzeniowego
- Odbudowa zrębu korony

### EQUIA Forte HT ZESTAW INTRO

APLIKATOR  
DO KAPSUŁEK GRATIS!

Zamów 1 opakowanie EQUIA Forte HT Zestaw Intro  
(20 kapsułek, 20 jednostkowych ampulek  
EQUIA Forte Coat)  
+ aplikator do kapsułek GRATIS!<sup>1</sup>

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC  
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.  
Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Dostępne opakowania:

**EQUIA Forte HT, uzupełnienie; 690 zł**  
Opakowanie zawiera: 50 kapsułek  
(proszek 0,4 g i płyn 0,1 ml/0,13 g).  
Zawartość kapsułki po zmieszaniu 0,14 ml.  
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4

**EQUIA Forte HT Zestaw Intro; 410 zł**  
Opakowanie zawiera: 20 kapsułek,  
20 jednostkowych ampulek EQUIA Forte Coat  
Odcienie: A2, A3, B2

**EQUIA Forte HT Zestaw Promo; 1 160 zł**  
Cena promocyjna dotyczy tylko  
opakowań w odcieniu A2 i A3

**1 160 zł** zamiast **1 415 zł**  
Opakowanie zawiera: 100 kapsułek EQUIA Forte HT Fil,  
EQUIA Forte Coat butelka 4 ml, akcesoria  
Odcienie: A2, A2-A3, A3, A3-B2

**EQUIA Forte HT Zestaw Clinic; 2 455 zł**  
Opakowanie zawiera: 200 kapsułek EQUIA Forte HT Fil,  
EQUIA Forte Coat butelka 4 ml, akcesoria  
Odcienie: A2, A3, B2



## EQUIA Forte HT technologia hybrydowa

- zwiększona przezierność
- jeszcze łatwiejsze stosowanie

### EQUIA Forte HT ZESTAW PROMO

EQUIA Forte HT  
ZESTAW INTRO GRATIS!

Zamów 1 opakowanie EQUIA Forte HT Zestaw Promo  
(100 kapsułek, 1x EQUIA Forte Coat 4 ml)  
+ 1 opakowanie EQUIA Forte HT Zestaw Intro A2  
(20 kapsułek, 20 jednostkowych ampulek  
EQUIA Forte Coat) GRATIS!<sup>1</sup>

<sup>1</sup>GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC  
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.  
Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Art. Nr 10004849  
**EQUIA Forte Coat FlipCap**  
Butelka 4 ml, akcesoria; **340 zł**

Art. Nr 10003514  
**EQUIA Forte Coat Unit dose**  
50 jednostkowych ampulek  
(0,1 ml), akcesoria; **480 zł**

### KORZYSTNA CENA

4 + 1  
10 + 3

690 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania EQUIA Forte HT Fil  
(po 50 kapsułek) w dowolnym odcieniu  
+ 1 opakowanie (50 kapsułek) Fuji IX GP FAST A2,  
Fuji II LC A2, Fuji TRIAGE Pink lub Fuji PLUS A3 GRATIS!<sup>1</sup>

Zamów 10 opakowań EQUIA Forte HT Fil  
(po 50 kapsułek) w dowolnym odcieniu  
+ 3 opakowania (po 50 kapsułek) Fuji IX GP FAST A2,  
Fuji II LC A2, Fuji TRIAGE Pink lub Fuji PLUS A3 GRATIS!<sup>1</sup>

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC  
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.  
Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Łatwość i koszty stosowania, zachowanie tkanek zęba, działanie w obszarach narażonych na duże obciążenia, status ryzyka próchnicy, niepożądane reakcje na materiał, a także znaczenie uwalniania jonów przez takie materiały to ważne kwestie, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze spośród alternatyw dla amalgamatu dentystycznego.

ŹRÓDŁO:  
OŚWIADCZENIE FDI  
**fdi**  
FDI World Dental Federation



## GC Fuji™ IX GP

Samoutwardzalny, kondensowalny materiał glasonomerowy o wysokiej lepkości do wypełnień w wersji normalnie wiążącej

Art. Nr 10000563 **Fuji IX GP Kapsułki A2; 530 zł**  
Art. Nr 10000564 **Fuji IX GP Kapsułki A3; 530 zł**

Opakowanie zawiera: 50 kapsułek  
Odcienie: A2, A3, A3.5, B2, B3, C4

Inne dostępne opakowania:

**FUJI IX GP proszek/płyn**

Zestaw 1-1 zawiera: 15 g proszek A3,  
6,4 ml płyn, akcesoria

Cena jednego opakowania; **390 zł**

Zestaw 3-2 zawiera: 3 x 15 g proszek A2, A3, B3;  
2 x 6,4 ml płyn, akcesoria

Cena jednego opakowania; **935 zł**

Uzupełnienie: 15 g proszek; **255 zł**; 6,4 ml płyn; **170 zł**

Odcienie: A2, A3, A3.5, B2, B3, C4



**MATERIAŁY  
SZKŁO-JONOMEROWE /  
SZKLANO-HYBRYDOWE  
GC (6 OPAKOWAŃ)**

**MIESZALNIK  
SILVERMIX  
GRATIS!**

Zamów 6 opakowań po 50 kapsułek materiałów szkło-jonomerowych/szklano-hybrydowych GC + Mieszalnik SilverMix GRATIS<sup>1</sup>!

Promocja dotyczy wszystkich materiałów szkło-jonomerowych/ szklano-hybrydowych dostępnych w kapsułkach. Możliwość mieszania kolorów.

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

## GC Fuji IX GP FAST

Samoutwardzalny, kondensowalny materiał glasonomerowy o wysokiej lepkości do wypełnień w wersji szybko wiążącej

Art. Nr 10000579 **Fuji IX GP FAST Kapsułki A2; 540 zł**  
Art. Nr 10000580 **Fuji IX GP FAST Kapsułki A3; 540 zł**

Opakowanie zawiera: 50 kapsułek  
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4



## GC Fuji IX GP EXTRA

Samoutwardzalny, kondensowalny materiał glasonomerowy do wypełnień o wysokiej lepkości i zwiększonej przezierności

Art. Nr 10000571 **Fuji IX GP EXTRA Kapsułki A2; 630 zł**  
Art. Nr 10000572 **Fuji IX GP EXTRA Kapsułki A3; 630 zł**

Opakowanie zawiera: 50 kapsułek  
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, asortyment

Inne dostępne opakowania:

**FUJI IX GP EXTRA proszek/płyn**

Zestaw 1-1 zawiera: 15 g proszek A2 lub A3,  
6,4 ml płyn, akcesoria

Cena jednego opakowania; **440 zł**

Uzupełnienie: 15 g proszek; **290 zł**; 6,4 ml płyn; **195 zł**

Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4



## GC Fuji II LC

Światłoutwardzalny, modyfikowany żywicą materiał glasonomerowy do wypełnień

Art. Nr 10000524 **Fuji II LC Kapsułki A2; 630 zł**  
Art. Nr 10000525 **Fuji II LC Kapsułki A3; 630 zł**

Opakowanie zawiera: 50 kapsułek  
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2

Inne dostępne opakowania:

**FUJI II LC Improved proszek/płyn**

Zestaw 3-2 zawiera: 3 x 15 g proszek (A2, A3 i B3);  
2 x 6,8 ml płyn; akcesoria

Cena jednego opakowania; **1 310 zł**

Uzupełnienie: 15 g proszek; **325 zł**; 6,4 ml płyn; **280 zł**

Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2





## GC Fuji I

Glasjonomerowy materiał do rutynowych procedur cementowania, idealny do osadzania prac na podbudowie metalowej

Art. Nr 10000503 Fuji I Light Yellow; 515 zł

Opakowanie zawiera: 50 kapsułek  
Odcień: Light Yellow - jasnożółty

Inne dostępne opakowania:

### Fuji I proszek/płyn

Zestaw 1:1 zawiera: 35 g proszek, 20 ml płyn  
Cena jednego opakowania; 535 zł  
Odcień: Light Yellow - jasnożółty

**KORZYSTNA  
CENA**

**4 + 1 | 10 + 3**

Zamów 4 dowolne opakowania po 50 kapsułek materiałów szkło-jonomerowych/szklano-hybrydowych w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie (50 kapsułek) Fuji IX GP FAST A2, Fuji II LC A2, Fuji TRIAGE Pink lub Fuji PLUS A3 GRATIS!<sup>1</sup>

Zamów 10 dowolnych opakowań po 50 kapsułek materiałów szkło-jonomerowych/szklano-hybrydowych w dowolnym odcieniu + 3 opakowania (po 50 kapsułek) Fuji IX GP FAST A2, Fuji II LC A2, Fuji TRIAGE Pink lub Fuji PLUS A3 GRATIS!<sup>1</sup>

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.  
Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



## GC Fuji TRIAGE

Glasjonomerowy materiał o niskiej lepkości, o działaniu ochronnym i kariostatycznym

Art. Nr 003297 Fuji TRIAGE kapsułki w odcieniu Pink; 595 zł  
Art. Nr 003298 Fuji TRIAGE kapsułki w odcieniu White; 595 zł

Opakowanie zawiera: 50 kapsułek  
Odcienie: Pink – różowy, White - biały

Inne dostępne opakowania:

### Fuji TRIAGE proszek/płyn

Zestaw 1:1 zawiera: 15 g proszek, 8 ml (10 g) płyn, 5,7 ml (6 g) Dentin Conditioner, akcesoria  
Cena jednego opakowania; 420 zł  
Odcienie: Pink - różowy, White - biały



## GC Fuji PLUS

Modyfikowany żywicą cement glasionomerowy do osadzania prac protetycznych

Art. Nr 10000509 Fuji PLUS kapsułki A3; 670 zł  
Art. Nr 10000508 Fuji PLUS kapsułki Yellow; 670 zł

Opakowanie zawiera: 50 kapsułek  
Odcienie: A3, Yellow

Inne dostępne opakowania:

### Fuji PLUS proszek/płyn

Zestaw 1:1 zawiera: 15 g proszek, 7 ml płyn, 6,5 g Fuji PLUS Conditioner  
Cena jednego opakowania; 610 zł

Uzupełnienie: 15 g proszek; 320 zł; 7 ml płyn; 210 zł  
Odcienie: A3, Yellow - żółty, Translucent - przezierny

# G-CEM ONE™ Universal

NOWOŚĆ


## Uniwersalny, samoadhezyjny cement kompozytowy

### Uproszczona, uniwersalna procedura adhezyjna dzięki G-Premio BOND:

- Połączenie trzech monomerów funkcyjnych zapewnia optymalną adhezję.
- Tylko jeden system wiążący do wszystkich bezpośrednich i pośrednich uzupełnień!
- Wielokrotnie nagradzana konstrukcja butelki zapewnia bardzo precyzyjną aplikację.
- Łatwa aplikacja: nałożyć G-Premio BOND, odczekać 10 sekund, osuszyć sprężonym powietrzem, utwardzać światłem przez 10 sekund.
- Kompatybilny ze wszystkimi metodami wytrawiania (samowytrawianie, wytrawianie selektywne, wytrawianie całkowite).



### Odcienie G-CEM ONE & G-CEM ONE Universal

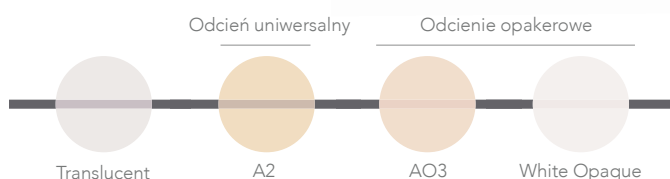

Teraz również w połączeniu z G-Premio BOND!

G-CEM ONE jest teraz dodatkowo dostępny w trzech nowych opakowaniach z G-Premio BOND.

Art. Nr 10037118

#### G-CEM ONE Universal Starter Kit A2

1 x G-CEM ONE Strzykawka A2 (4,6 g),  
8 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular,  
2 x końcówka mieszająca GC Automix Endo Tips,  
1 x G-Premio BOND 5 ml; **550 zł**

Art. Nr 10037119

#### G-CEM ONE Universal Starter Kit Translucent

1 x G-CEM ONE Strzykawka TR (4,6 g),  
8 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular,  
2 x końcówka mieszająca GC Automix Endo Tips,  
1 x G-Premio BOND 5 ml; **550 zł**

Art. Nr 10037120

#### G-CEM ONE Universal System Kit

1 x G-CEM ONE Strzykawka A2 (4,6 g),  
1 x G-CEM ONE Strzykawka TR (4,6 g),  
15 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular,  
5 x końcówka mieszająca GC Automix Endo Tips,  
1 x G-Premio BOND 5 ml,  
1 x G-Multi PRIMER 5 ml; **750 zł**

## Rozwiązania do cementowania

Przewodnik „GC Luting Guide” pomoże Ci wybrać właściwy materiał. Zawiera również informacje dotyczące poszczególnych etapów cementowania.

Odkryj przewodnik GC Luting Guide!



Instrukcje krok-po-kroku dla wszystkich procedur cementowania można znaleźć w przewodniku „GC Luting Guide”



Więcej informacji można znaleźć w naszym „GC Luting Guide” lub w aplikacji!

# G-CEM ONE

## Samoadhezyjny cement kompozytowy



### Niezawodny

Optymalna siła wiązania zarówno w przypadku preparacji o charakterze retencyjnym jak i nieretencyjnym<sup>1</sup> dzięki funkcji GC Touch Cure - unikalnej zdolności wiązania kontaktowego opcjonalnie stosowanego primera G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer.

### Niewrażliwy na technikę pracy

Doskonałe samoutwardzanie dla Twojego poczucia bezpieczeństwa, funkcja tack-cure ułatwiająca usuwanie nadmiaru i oczyszczanie, tolerancja wilgoci i śliny<sup>1</sup>, optymalna płynność pasty i praktycznie brak nadwrażliwości pozabiegowej<sup>3</sup>.

### Uniwersalny

Doskonała siła wiązania do zębów oraz do powierzchni i podłoży: szkliska, zębiny, cyrkonu, metalu, ceramiki szklanej<sup>2</sup>, ceramiki hybrydowej<sup>2</sup>.

### Estetyczny

Odporne na ścieranie brzegi dla długotrwałych efektów estetycznych.

### GC Touch Cure

Inicjator chemiczny w G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer przyspiesza utwardzanie chemiczne cementu na powierzchni zęba w celu zapewnienia stabilnego połączenia.

### Opcjonalny: G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

Do wszystkich ubytków i zębów filarowych

- MDP: łączenie z tkankami zęba, cyrkonem i metalem nieszlachetnym
- 4-MET: łączenie z tkankami zęba
- MDTP: łączenie z metalem szlachetnym
- Akcelerator – silne połączenie z zębem filarowym i ubytkiem dzięki funkcji GC Touch Cure.



**KORZYSTNA CENA**

**4 + 1**

**OD 295 zł**

Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania G-CEM ONE Single Refill lub 2 opakowania G-CEM ONE Twin Refill lub 1 opakowanie G-CEM ONE Twin Refill i 2 opakowania G-CEM ONE Single Refill + G-CEM ONE Single Refill AO3 lub White Opaque GRATIS!<sup>1</sup>

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Art. Nr 10006932 **G-CEM ONE Single Refill AO3**  
Art. Nr 10006933 **G-CEM ONE Single Refill White Opaque**  
Opakowanie Single Refill zawiera: 1 x G-CEM ONE strzykawka (4,6 g), 8 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 2 x końcówka mieszająca GC Automix Endo Tips;  
Cena jednego opakowania; **295 zł**

Art. Nr 10006930 **G-CEM ONE Twin Refill A2**  
Art. Nr 10006931 **G-CEM ONE Twin Refill Translucent**  
Opakowanie Twin Refill zawiera: 2 x G-CEM ONE strzykawka (4,6 g), 15 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 5 x końcówka mieszająca GC Automix Endo Tips;  
Cena jednego opakowania; **550 zł**

Inne dostępne opakowania:  
Art. Nr 10006934 **G-CEM ONE Value Refill A2**  
Art. Nr 10006935 **G-CEM ONE Value Refill Translucent**  
Opakowanie Value Refill zawiera: 8 x G-CEM ONE strzykawka (4,6 g), 60 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 20 x końcówka mieszająca GC Automix Endo Tips;  
Cena jednego opakowania; **1 770 zł**

Art. Nr 10006927 **G-CEM ONE Starter Kit A2**  
Art. Nr 10006928 **G-CEM ONE Starter Kit Translucent**  
Starter Kit zawiera: 1 x G-CEM ONE strzykawka (4,6 g), 8 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 2 x końcówka mieszająca GC Automix Endo Tips, 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 2 ml;  
Cena jednego opakowania; **355 zł**

Art. Nr 10006929 **G-CEM ONE System Kit**  
System Kit zawiera: 1 x G-CEM ONE Strzykawka A2 (4,6 g), 1 x G-CEM ONE Strzykawka TR (4,6 g), 15 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 5 x końcówka mieszająca GC Automix Endo Tips, 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4 ml, 1 x G-Multi PRIMER 5 ml;  
Cena opakowania; **705 zł**

Art. Nr 10006834 **G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer**  
Zawiera: 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4 ml;  
Cena jednego opakowania; **305 zł**  
Akcesoria:  
Art. Nr 10003289 **Automix Tip for Endo** 10 szt. z końcówką przedłużającą; **65 zł**  
Art. Nr 10003335 **Automix Tip Regular** 10 szt.; **60 zł**

**KORZYSTNA CENA**

**3 + 1**

**295 zł**

Cena jednego opakowania

Zamów 3 opakowania G-CEM ONE Single Refill w odcieniu White Opaque + G-CEM ONE Single Refill w odcieniu White Opaque GRATIS!<sup>1</sup>

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Art. Nr 10006933 **G-CEM ONE Single Refill White Opaque**  
Opakowanie zawiera: 1 x G-CEM ONE strzykawka (4,6 g), 8 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 2 x końcówka mieszająca GC Automix Endo Tips;  
Cena jednego opakowania; **295 zł**

# GC FujiCEM™ Evolve

Rozwiązanie do osadzania cyrkonu od lidera w technologii szkło-jonomerów



Zeskanuj, aby obejrzeć filmy wideo

## O jeden krok do przodu

FujiCEM Evolve to wszechstronne rozwiązanie do cementowania w codziennej pracy, łączące prosty protokół postępowania z wyjątkowymi właściwościami szkło-jonomerów GC. Nowy system dozowania i możliwość utwardzenia światłem w celu usunięcia pozostałości materiału, ułatwiają cementowanie. Ponadto FujiCEM Evolve charakteryzuje się ulepszonymi właściwościami, takimi jak wyższa nieprzepuszczalność dla promieni rtg i bardziej trwałe wiązanie – zwłaszcza z tlenkiem cyrkonu.



### Idealny do uzupełnień z metalu i cyrkonu

- Optymalna adhezja do cyrkonu
- Wersja do mieszania ręcznego lub Automix
- Bez konieczności wcześniejszego przygotowania
- Długi czas pracy, krótki czas wiązania
- Odporny na wilgoć – koferdam nie jest wymagany
- Doskonałe uszczelnienie i adaptacja brzeżna
- Optymalna lepkość
- Minimalna grubość warstwy
- Opcjonalne utwardzanie światłem

## KORZYSTNA CENA

JUŻ TERAZ ZACZNIJ STOSOWAĆ

3 + 1

420 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 3 opakowania FujiCEM Evolve Single Pack + 1 opakowanie FujiCEM Evolve Single Pack GRATIS!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Art. Nr 10004927

### FujiCEM Evolve Single Pack

Opakowanie zawiera: 1 strzykawkę FujiCEM Evolve (5 ml/9,2 g), 15 końcówek GC Push and Click Tip Regular; **420 zł**

Inne dostępne opakowania:

Art. Nr 10004871

### FujiCEM Evolve Triple Pack Handmix

Opakowanie zawiera: 3 strzykawki FujiCEM Evolve (5 ml/9,2 g), bloczek N° 22 do mieszania; **915 zł**

Art. Nr 10006621

### FujiCEM Evolve Clinic Pack

Opakowanie zawiera: 8 strzykawkę FujiCEM Evolve (5 ml/9,2 g), 2 bloczki do mieszania N° 22; **2 165 zł**

Art. Nr 10004930

### FujiCEM Evolve Triple Pack Automix

Opakowanie zawiera: 3 strzykawki FujiCEM Evolve (5 ml/9,2 g), 45 końcówek GC Push and Click Tip Regular; **1 070 zł**

Akcesoria:

Art. Nr 10004917

### Końcówki Push and Click Tip Regular (15 szt.); 105 zł

Art. Nr 10004929

### Końcówki Push and Click Tip Endo (15 szt.); 140 zł

# GC FujiCEM 2 Slide & Lock

Wysokiej jakości, modyfikowany żywicą cement glasjonomerowy do osadzania w połączeniu z innowacyjną technologią Force & Fusion



Art. Nr 10003463 **GC FujiCEM 2 Zestaw Starter z metalowym dozownikiem Paste Pak; 1 075 zł**

1 x nabój FujiCEM 2 SL (7,2 ml/13,3 g), 15 x końcówka mieszająca SL, 5 x końcówka mieszająca do Endo, 1 x metalowy dozownik Paste Pak

Art. Nr 10003462 **GC FujiCEM 2 Zestaw Starter z dozownikiem z tworzywa GC FujiCEM 2; 760 zł**

1 x nabój FujiCEM 2 SL (7,2 ml/13,3 g), 15 x końcówka mieszająca SL, 5 x końcówka mieszająca do Endo, 1 x dozownik z tworzywa GC FujiCEM 2

Art. Nr 10003461 **GC FujiCEM 2 SL Automix; 1 420 zł**

2 x nabój FujiCEM 2 SL (7,2 ml/13,3 g), 44 x końcówka mieszająca SL

Art. Nr 10003458 **GC FujiCEM 2 SL uzupełnienie; 1 060 zł**

2 x nabój FujiCEM 2 SL (7,2 ml/13,3 g), 2 x bloczek do mieszania N°22

Art. Nr 10003468 **GC FujiCEM 2 SL Eco Pack; 2 120 zł**

Zawiera: 4 x nabój FujiCEM 2 SL (7,2 ml/13,3 g)

Akcesoria:

Art. Nr 10003465 **GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL do Endo uzupełnienie; 130 zł**

10 x końcówka mieszająca SL do Endo (kompatybilne tylko z FujiCEM 2 SL)

Art. Nr 10003464 **GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL uzupełnienie; 225 zł**

20 x końcówka mieszająca SL (kompatybilne tylko z FujiCEM 2 SL)



Kliknij tutaj, aby przejść do strony internetowej: Initial LiSi Block

initial<sup>™</sup>  
LiSi Block

GC FUJICEM EVOLVE  
GC FUJICEM 2 SL  
GC INITIAL LISI BLOCK



## GC Initial<sup>™</sup> LiSi Block

W pełni skryształizowany bloczek CAD/CAM z dwukrzemianu litu

Initial LiSi Block jest w pełni skryształizowanym bloczkiem z dwukrzemianu litu, który zapewnia optymalne właściwości fizyczne bez wypalania. Bloczek cechują wyjątkowe właściwości oparte na opatentowanej przez GC technologii HDM (High Density Micronization) użytej w stomatologii CAD/CAM, aby zapewnić wysoką odporność na ścieranie, precyzyjne krawędzie i estetyczne efekty końcowe. W połączeniu z techniką ONE SQIN – systemem ceramicznym do malowania koloru i nadawania kształtu - można szybko i łatwo osiągnąć jeszcze bardziej estetyczne rezultaty.



### KORZYSTNA CENA

4 + 1

10 + 3

460 zł

Cena jednego opakowania



Zamów 4 opakowania bloczków Initial LiSi Block (po 5 sztuk) w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie bloczków Initial LiSi Block (5 sztuk) A2 HT lub A2 LT w rozmiarze 14 GRATIS!  
Zamów 10 opakowań bloczków Initial LiSi Block (po 5 sztuk) w dowolnym odcieniu + 3 opakowania bloczków Initial LiSi Block (po 5 sztuk) A2 HT lub A2 LT w rozmiarze 14 GRATIS!


<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Odcienie:  
A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT  
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT  
BL  
Rozmiar 14; **460 zł** za opakowanie  
Opakowanie zawiera 5 bloczków

Art. Nr 10007322  
**Initial LiSi Block Aesthetic Kit**

Zestaw zawiera:  
5 x Initial LiSi Block (A1 HT, A2 HT, A2 LT, A3 HT, A3 LT), CEREC, rozmiar 14  
5 x Initial IQ, Lustre Paste ONE (L-NFL, L-A, L-3, L-2, L-OP), 4g  
1 x Płyn do rozcieńczenia, 8 ml  
1 x Płyn do odświeżania, 8 ml, akcesoria; **1 985 zł**

### Polerowanie i wykańczanie

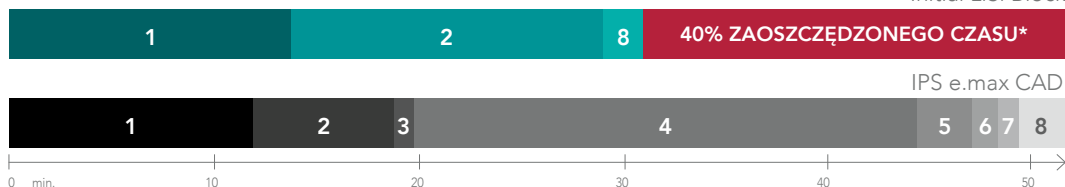

1 Frezowanie 2 Polerowanie wstępne 3 Nakładanie masy do wypalania ceramiki 4 Krystalizacja 5 Chłodzenie 6 Usuwanie masy do wypalania ceramiki 7 Oczyszczanie 8 Polerowanie końcowe

Źródło: GC R&D, Japonia, dane dostępne na życzenie. \*Przy warunkach testu w oparciu o Instrukcję użytkownika

- Oszczędność czasu, ponieważ nie wymaga krystalizacji
- Trwała estetyka
- Idealnie dopasowane krawędzie
- Naturalna opalescencja
- Idealna baza dla techniki ONE SQIN
- Po prostu wyfrezuj, pomaluj i zacementuj

## FREEGENOL

### Cement do tymczasowego osadzania

FREEGENOL jest cementem bez eugenolu do tymczasowego cementowania uzupełnień pośrednich. Jest w pełni kompatybilny i bezpieczny w użyciu z materiałami zawierającymi żywice akrylowe. Biokompatybilny z tkankami zęba i tkankami miękkimi. FREEGENOL jest łatwy w użyciu i po zmieszaniu ma gładką, kremową konsystencję.



Art. Nr 10000675  
**FREEGENOL  
TEMPORARY 1-1 Pack;  
250 zł**  
Opakowanie zawiera:  
55 g Baza,  
20 g Katalizator,  
2,5 ml środek czyszczący,  
błoczek do mieszania

## GC Fuji TEMP LT™

### Bezkompromisowy, niezawodny, komfortowy przy zdejmowaniu cement glasonomerowy

do długotrwałego cementowania tymczasowego



Art. Nr 10007514  
**GC Fuji TEMP LT  
uzupełnienie; 770 zł**  
Opakowanie zawiera:  
2 naboje Fuji TEMP LT  
(7,2 ml/13,3 g), 1 błoczek  
do mieszania N° 22

Akcesoria:  
Art. Nr 70000002  
**Paste Pak Dispenser,  
podajnik; 480 zł**

## GC PLIERS

### Kleszce ze stali nierdzewnej

przeznaczone do łatwego usuwania i przenoszenia uzupełnień pośrednich. Dzięki retencyjnym końcówkom roboczym dobrze utrzymują uzupełnienia.



Art. Nr 10001804  
**GC PLIERS  
z Accessory Set; 1 480 zł**  
Opakowanie zawiera:  
Kleszce GC PLIERS,  
gumowe nakładki (50 szt.),  
proszek retencyjny (4 g).

Akcesoria:  
Art. Nr 10000089  
**Accessory Set; 440 zł**  
Opakowanie zawiera:  
gumowe nakładki (50 szt.),  
proszek retencyjny (4 g).

## UNIFAST III

### Samoutwardzalna żywica akrylowa

do długoterminowych uzupełnień tymczasowych:  
koron, mostów, wkładów i napraw.  
Ekonomiczne rozwiązanie z doskonałą estetyką.



Dostępne opakowania:  
Art. Nr 10000697  
**Unifast III  
Zestaw wprowadzający 2-1;  
480 zł**  
Zawiera:  
35 g proszek A2-A3,  
40 g (42 ml) płyn,  
akcesoria.

## REVOTEK LC

### Jednoskładnikowy kompozyt utwardzany światłem

do wykonywania tymczasowych wkładów, nakładów,  
koron, licówek i mostów.



Dostępne opakowania:  
Art. Nr 10000246  
**Revotek LC; 370 zł**  
6 g materiału  
w odcieniu B2.



Skontaktuj się z Konsultantem GC,  
aby uzyskać więcej informacji na temat TEMPSMART DC!

FREEGENOL  
GC FUJI TEMP LT  
GC PLIERS  
UNIFAST III  
REVOTEK LC  
TEMPSMART DC  
OPTIGLAZE COLOR

## TEMPSMART™ DC

### Szybko i skutecznie do tymczasowego uzupełnienia

Uzupełnienia tymczasowe odgrywają ważną rolę w stomatologii odtwórczej.

Nie tylko chronią opracowane zęby, ale także zapewniają komfort i estetykę do momentu uzyskania przez pacjenta ostatecznej odbudowy. Wprowadzona przez GC nowa technologia, dzięki TEMPSMART DC, czyni materiały tymczasowe bardziej inteligentnymi.

TEMPSMART DC to pierwszy, niezawierający plastyfikatorów, podwójnie utwardzalny materiał tymczasowy, zaprojektowany tak, aby ułatwić i uczynić codzienną pracę bardziej wydajną.



#### PEWNA WYTRZYMAŁOŚĆ

- Wysoka odporność na złamania
- Idealny na mosty w odcinku bocznym

#### INTELIĞENTNA KONCEPCJA

- Krótki czas obróbki dzięki opcji utwardzania światłem



#### KOMFORT UŻYTKOWANIA

- Nie klei się
- Wysoki połysk w kilku krokach

#### ESTETYCZNE REZULTATY

- Fluorescencja i długotrwały połysk

### KORZYSTNA CENA

4 + 1

470 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania TEMPSMART DC nabój 48 ml w dowolnym odcieniu + nabój 48 ml w odcieniu A2 lub A3 GRATIS<sup>1</sup>!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Akcesoria:

Art. Nr 10003754

Końcówki mieszające II SSS (60 szt.); 280 zł

Art. Nr 10003335

Końcówki mieszające GC Automix Tip Regular (10 szt.); 60 zł



Dostępne opakowania:

Art. Nr 10001474 TEMPSMART DC A2

Art. Nr 10001475 TEMPSMART DC A3

Zawiera: 1 x 48 ml nabój, 16 końcówek mieszających; 470 zł

Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, B1, BW

Dostępne opakowania:

Art. Nr 10001480 TEMPSMART DC A2

Art. Nr 10001481 TEMPSMART DC A3

Zawiera: 1 x 10 ml strzykawka, 10 końcówek mieszających; 280 zł

Odcienie: A1, A2, A3, B1

## OPTIGLAZE color

Światłoutwardzalna glazura do charakteryzacji pośrednich uzupełnień akrylowych, kompozytowych, z PMMA, ceramiki hybrydowej i druku 3D

Dostępne opakowania:

**OPTIGLAZE color** butelka 2,6 ml; 260 zł

Kolory: A plus, B plus, C plus, White, Ivory White, Yellow, Orange, Pink Orange, Red Brown, Olive, Grey, Blue, Lavender, Pink, Red

**OPTIGLAZE color** butelka 5 ml; 260 zł

Kolory: Clear, Clear HV



### KORZYSTNA CENA

4 + 1

260 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania OPTIGLAZE color + 1 opakowanie OPTIGLAZE color A plus lub Clear GRATIS<sup>1</sup>!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

## GRADIA® CORE

Podwójnie utwardzalny kompozyt do odbudowy zrębu i cementowania wkładów

Niezawodna retencja na całej głębokości



Cementowanie wkładu i odbudowa zrębu jednym tiksotropowym materiałem



Dostępne opakowania:  
Art. Nr 10004896 **GRADIA CORE Intro Package**  
Zawiera: GRADIA CORE nabój 10 ml (20 g),  
G-Premio BOND butelka 5 ml,  
G-Premio BOND DCA butelka 3 ml,  
podajnik GRADIA CORE Dispenser;  
Cena jednego opakowania; **1 005 zł**

Art. Nr 10004816 **GRADIA CORE Kit**  
Zawiera: GRADIA CORE nabój 10 ml (20 g),  
G-Premio BOND butelka 5 ml,  
G-Premio BOND DCA butelka 3 ml;  
Cena jednego opakowania; **970 zł**

Art. Nr 10000765 **GRADIA CORE cartridge Refill**  
Zawiera: GRADIA CORE nabój 10 ml (20 g);  
Cena jednego opakowania; **485 zł**



Zachowuje się podobnie jak zębina

Twardość\* (Hv) **66**

\* W trybie podwójnego utwardzania  
Źródło: GCC R&D - dane dostępne na życzenie



Siła wiązania z zębiną (MPa), podwójne utwardzanie **21**



Bezpieczna retencja przy użyciu uniwersalnego systemu łączącego

Źródło: GCC R&D - dane dostępne na życzenie

## everStick®

Wzmocnienia z włókien do codziennej praktyki stomatologicznej

- Minimalnie inwazyjne i odwracalne: inne możliwości leczenia pozostają nadal otwarte
- Doskonałe właściwości mechaniczne
- Unikalne, opatentowane połączenie
- Elastyczność zbliżona do elastyczności zębiny
- Obszerne informacje naukowe
- Ponad 300 publikacji i szereg rozpraw naukowych
- Długoterminowe obserwacje kliniczne z doskonałymi rezultatami

Uzupełnienia:

Art. Nr 10003436 **everStick C&B**, 1 x 8 cm; **340 zł**

Art. Nr 10003435 **everStick C&B**, 2 x 12 cm; **925 zł**

Art. Nr 10003422 **everStick NET**, 30 cm<sup>2</sup>; **925 zł**

Art. Nr 10003426 **everStick ORTHO**, 2 x 12 cm; **790 zł**

Art. Nr 10003434 **everStick PERIO**, 1 x 8 cm; **310 zł**

Art. Nr 10003433 **everStick PERIO**, 2 x 12 cm; **865 zł**

Art. Nr 10003430 **everStick POST**, 10 x wkład Ø 0,9 mm; **550 zł**

Art. Nr 10003431 **everStick POST**, 10 x wkład Ø 1,2 mm; **550 zł**

Art. Nr 10003432 **everStick POST**, 10 x wkład Ø 1,5 mm; **550 zł**



Dostępne opakowania:

Art. Nr 10003423 **everStick, Starter Kit**; **2 020 zł**

Zestaw zawiera: 8 cm everStick C&B; 8 cm everStick PERIO; 30 cm<sup>2</sup> everStick NET; 5 x everStick POST Ø 1,2 mm; 6 ml Modeling Liquid; 1 x G-aenial Universal Flo strzykawka; 1 x instrument silikonowy StickREFIX D; 1 x StickSTEPPER; 1 x StickCARRIER

Art. Nr 10003438 **everStick COMBI Kit**; **1 095 zł**

Zestaw zawiera: 8 cm everStick C&B; 8 cm everStick PERIO, 30 cm<sup>2</sup> everStickNET, 5 x everStick POST Ø 1,2 mm, 1 instrument ręczny StickSTEPPER, 1 instrument silikonowy StickREFIX D

Art. Nr 10003437 **everStick Intro Kit**; **440 zł**


Zestaw zawiera: 8 cm everStick C&B, 8 cm everStick PERIO, 1 instrument silikonowy StickREFIX D

Art. Nr 10003429 **everStick POST Intro**; **875 zł**

Zestaw zawiera: 5 x wkład Ø 0,9 mm; 5 x wkład Ø 1,2 mm; 5 x wkład Ø 1,5 mm; 6 ml Modeling Liquid

# Implanty Aadva™

  
Zeskanuj, aby  
obejrzeć filmy wideo

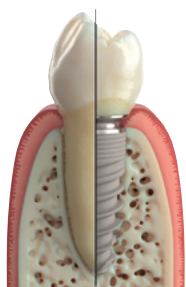

System implantologiczny GC Aadva opiera się na nowatorskiej synergii implantoprotetyki z koncepcją stomatologii CAD/CAM. Wszystkie elementy systemu są rozwiązaniami reprezentującymi najbardziej aktualny stan wiedzy i spełniają najwyższe standardy jakości GC.

## Linia implantów GC Aadva

Implanty cylindryczne



Implanty stożkowe



Implanty krótkie

Długość 6,3 mm



**OFERTA  
NA START\***

**4 999 zł**

Zamów **OFERTĘ NA START**  
+ **G-CEM ONE System Kit GRATIS!**

Zawiera: 10 x implant, 10 x śruba zamykająca,  
1 x kasetę chirurgiczną Aadva Surgical Kit  
+ **G-CEM ONE System Kit GRATIS!**  
Zestaw zawiera: 2 x G-CEM ONE  
strzykawka 4,6 g (A2 i TR), 1 x G-CEM ONE  
Adhesive Enhancing Primer 4 ml, 1 x G-Multi  
PRIMER 5 ml, akcesoria

\*GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC  
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.  
\*Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

## Szkolenia Implantologiczne

### 1 Wprowadzenie do chirurgii implantologicznej na podstawie systemu GC Aadva

#### Część teoretyczna

- Wprowadzenie do implantologii
- Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu implantacji
- Przygotowanie gabinetu do zabiegu
- Dobór implantu do warunków anatomicznych
- Kwalifikacja pacjenta

- Zasady planowania implantoprotetycznego
- Powikłania pozabiegowe

#### Część praktyczna

- Analiza CBCT
- Zabiegi z udziałem pacjentów



**PROWADZĄCY**  
dr n. med. Tomasz Klatkiewicz

**1 SZKOLENIE**  
Środa Wielkopolska

Szczegóły u Konsultanta GC

**Koszt uczestnictwa: 1 750 zł**

### 2 Techniki chirurgiczne w leczeniu implantologicznym – kurs praktyczny na preparatach ludzkich

#### Część praktyczna

- Wprowadzenie do implantologii i procedur
- Podstawy analizy zdjęć CBCT, planowanie implantacji i rekonstrukcji protetycznej
- Sposoby wykonania rekonstrukcji protetycznych
- Podstawowe zabiegi augmentacji podczas zabiegu implantacji
- Analiza CBCT preparatów głów ludzkich
- Zabiegi pokazowe na preparatach nieutrwalonych głów ludzkich wykonywane przez prowadzących
- Indywidualne warsztaty z prowadzącymi
- Samodzielne zabiegi ekstrakcji i implantacji



**PROWADZĄCY**  
dr n. med. Tomasz Klatkiewicz  
dr n. med. Krzysztof Gawrołek

**2 SZKOLENIE**  
Przeźmierowo k. Poznań  
6-7.03.2025 r.

Szczegóły:  
[www.poznanlab.pl](http://www.poznanlab.pl)  
lub u Konsultanta GC

# Warsztaty praktyczne z naszymi ekspertami



**PROWADZĄCA**  
dr n. med. Kamila  
Wróbel-Bednarz

## 1 Protokół tworzenia estetycznych koron „od A do Z”

### Czego się dowiesz?

Jak zaplanować leczenie protetyczne w oparciu o normy okluzyjne. Jaki wybrać sposób preparacji. Jak bezpiecznie przeprowadzić cały proces, aby uzyskać długotrwały sukces kliniczny.

### Warsztat

W części praktycznej wykonasz preparacje pod korony oraz procedury cementowania w protokole adhezyjnym i tradycyjnym.

- 07.03.2025r. Łódź
- 13.06.2025r. Częstochowa
- 29.03.2025r. Gdańsk
- 14.06.2025r. Kraków



**PROWADZĄCY**  
lek. dent. Daniel  
Nowakowski

## 2 Onlay & overlay „od A do Z” – od preparacji po cementowanie

### Czego się dowiesz?

Jakie są kryteria kwalifikacji pod poszczególne rodzaje uzupełnień pośrednich. Jak sytuacja kliniczna wpływa na wybór materiału odtwórczego. Jakie korzyści oferuje technika DME (Deep Margin Elevation).

### Warsztat

W części praktycznej wykonasz preparację pod częściowe uzupełnienie protetyczne typu overlay oraz procedurę cementowania adhezyjnego.

- 22.03.2025r. Kalisz
- 23.05.2025r. Białystok
- 25.04.2025r. Katowice
- 24.05.2025r. Warszawa
- 26.04.2025r. Nowy Targ
- 06.06.2025r. Koszalin



**PROWADZĄCA**  
lek. dent. Urszula  
Witek-Furman

## 3 Minimalnie inwazyjne techniki zmiany kształtu zębów w odcinku przednim


### Czego się dowiesz?

Jak zmienić kształt zęba mikrodontycznego techniką bezpośrednią. Jak uniknąć złamania odbudowanego brzegu siecznego. Jak odbudować mikro- i makrostrukturę powierzchni zębów przednich.

### Warsztat

W części praktycznej wykonasz odbudowę startych brzegów siecznych, ubytku klinowego oraz procedurę zamknięcia diastemy wraz ze zmianą kształtu zęba.

- 22.02.2025r. Kielce
- 06.06.2025r. Kraków
- 17.05.2025r. Rzeszów
- 14.06.2025r. Warszawa

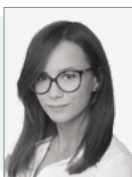

**PROWADZĄCA**  
lek. dent.  
Aleksandra Ślaczan

## 4 Bezpośrednia licówka kompozytowa – naturalna estetyka w przypadku ekstremalnych wyzwań

### Czego się dowiesz?

W jaki sposób poprawić estetykę zębów przednich z rozległymi ubytkami. Jak stworzyć naturalną strukturę powierzchni zęba w trzech prostych krokach.

### Warsztat

W części praktycznej wykonasz krok-po-kroku licówkę kompozytową metodą bezpośrednią. Przeprowadzisz pełen protokół polerowania uzupełnień kompozytowych.

- 25.01.2025r. Radom
- 30.05.2025r. Katowice
- 07.06.2025r. Rzeszów

## 5 Funkcjonalna i estetyczna odbudowa kompozytowa zębów bocznych

### Czego się dowiesz?

Jak wymodelować funkcjonalne stoki guzków. Poznasz praktyczne wskazówki i triki ułatwiające pracę i minimalizujące korekty w zgryzie.

### Warsztat

W części praktycznej odtworzysz morfologię zębów bocznych na papierowych rycinach. Odbudujesz dwa ubytki klasy II – rozległy oraz preparowany minimalnie inwazyjne.

- 14.03.2025r. Białystok
- 15.03.2025r. Warszawa
- 28.03.2025r. Tychy
- 25.04.2025r. Gdańsk
- 26.04.2025r. Bydgoszcz
- 31.05.2025r. Gliwice



**PROWADZĄCA**  
lek. dent. Urszula  
Witek-Furman

## 6 Odbudowa metodą iniekcji kompozytu

### Czego się dowiesz?

Jak wykonać odbudowę metodą iniekcji kompozytu. Jak uzyskać łatwą i przewidywalną estetykę w szybszy i tańszy sposób bez preparacji zębów.

### Warsztat

W części praktycznej wykonasz licówkę w odcinku przednim oraz odbudujesz startą powierzchnię zęba trzonowego metodą iniekcji kompozytu.

- 21.03.2025r. Wrocław
- 07.06.2025r. Szczecin



**PROWADZĄCY**  
lek. dent. Daniel  
Nowakowski

## 7 Jednowizytowa przebudowa zwarcia oraz kontrola okluzji

### Czego się dowiesz?

Jak w szybki, bezpieczny i mało inwazyjny sposób stworzyć „nową okluzję” dla pacjenta, dzięki użyciu materiału kompozytowego, bez konieczności przygotowywania mock-up’u.

### Warsztat

W części praktycznej wykonasz anatomiczne odbudowy startych powierzchni zębów w odcinku przednim i bocznym. Przeprowadzisz kontrolę z użyciem kalek okluzyjnych.

- 01.02.2025r. Sieradz
- 07.02.2025r. Gliwice
- 08.02.2025r. Kraków
- 21.02.2025r. Zielona Góra
- 22.02.2025r. Szczecin
- 28.02.2025r. Poznań
- 01.03.2025r. Warszawa
- 14.03.2025r. Rzeszów
- 15.03.2025r. Lublin
- 05.04.2025r. Jelenia Góra
- 23.05.2025r. Gdańsk
- 24.05.2025r. Toruń
- 30.05.2025r. Łódź
- 31.05.2025r. Wrocław



**PROWADZĄCA**  
lek. dent. Magdalena  
Okręt-Stochaj

### JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z Konsultantem GC, aby uzyskać więcej informacji lub napisz e-mail na adres: [info.poland@gc.dental](mailto:info.poland@gc.dental)

Skondensowana wiedza na temat G-æniał A'CHORD dostępna teraz online


## G-æniał A'CHORD

W celu jak najłatwiejszego udostępnienia praktykom nie tylko teoretycznej, ale i praktycznej wiedzy na temat G-æniał A'CHORD, GC uruchomiło specjalną stronę internetową.

<http://gaenialachord.com>

Poza teoretycznymi wyjaśnieniami, strona ta ilustruje np. skalę odcieni. A fakt, że estetykę i wytrzymałość uzupełnień w odcinku przednim i bocznym można połączyć w jeden prosty system, został potwierdzony w praktyce przez różnych lekarzy dentystów z Australii, Francji czy Niemiec.

Grafiki wizualizują także wysoką wytrzymałość i odporność na ścieranie G-æniał A'CHORD, podczas gdy filmy wideo pokazują praktyczne zastosowanie zarówno w obrazie jak i w dźwięku.

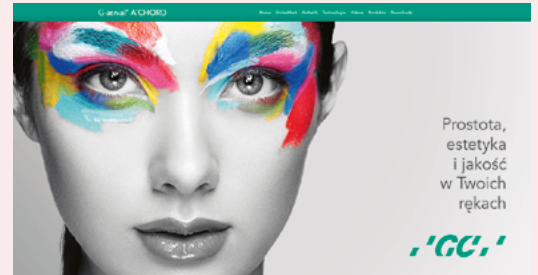

## Przewodnik "Restorative solution" z GC

Od początku swojej działalności GC zawsze koncentrowało się na opracowaniu innowacyjnych materiałów odtwórczych dla każdej sytuacji klinicznej. Aby ułatwić stomatologom te procedury, GC przygotowało przewodnik "GC Restorative Solution", dostępny jako bezpłatna aplikacja na systemy Android i iOS.

W zależności od projektowanego uzupełnienia, materiału i uwarunkowań klinicznych aplikacja pomaga wybrać najlepszy materiał odtwórczy. Przewodnik przedstawia w 3D wszystkie rodzaje ubytków i pokazuje ich odbudowę przy użyciu zaawansowanych szkło-jonomerów,

hybrydy szkła i/lub kompozytów GC do odbudowy zębów. Aplikacja zawiera również instrukcje krok po kroku, jakie odcienie i grubości warstw należy stosować, aby uzyskać jak najlepszy efekt. Ponadto aplikacja zawiera informacje na temat systemów adhezyjnych i technik odbudowy wzmocnionych włóknem szklanym, a także szczegółowe ilustracje dotyczące procedur naprawy uzupełnień pośrednich.



## Przewodnik GC dotyczący cementowania

**Wybór właściwego materiału dla każdego wskazania**

Długotrwałe powodzenie odbudowy zależy przede wszystkim od właściwego doboru i prawidłowego zastosowania materiałów do osadzania. Ponieważ idealny materiał do cementowania, który spełnia wszystkie wymagania dla każdego wskazania nie istnieje, wyboru należy dokonać w zależności od właściwości fizycznych i adhezyjnych, wymagań estetycznych, wrażliwości techniki i dowodów naukowych dostępnych dla każdego przypadku. Aby ułatwić ten proces stomatologom GC opracowało przewodnik "GC Luting Guide",

dostępny jako bezpłatna aplikacja na systemy Android i iOS. W zależności od projektowanego uzupełnienia, materiału i uwarunkowań klinicznych aplikacja pomaga wybrać najlepsze rozwiązanie do cementowania. Oprócz wyboru materiału do osadzania, decydujące znaczenie ma jego prawidłowe zastosowanie. W przewodniku "GC Luting Guide" każdy etap kliniczny jest od początku do końca szczegółowo opisany i zilustrowany przejrzystymi zdjęciami.



Szkolenia praktyczne w Twoim gabinecie: rozwiązania i praktyczna wiedza!

## Protokół tworzenia estetycznych koron

Poznaj rozwiązania GC i protokół tworzenia estetycznych koron. Odkryj nasze karty techniczne obejmujące etap wyboru materiału odtwórczego i sposobu preparacji oraz protokoły cementowania.

### Szkolenie praktyczne:

- Tradycyjne i adhezyjne cementowanie estetycznych koron w odcinku przednim i bocznym.

## Biomimetyczne rozwiązania do odbudowy zębów bocznych

Wybierz swoje optymalne rozwiązanie do odbudowy rozległych ubytków w zębach bocznych: wzmocniony krótkimi włóknami płynny kompozyt everX Flow czy szklano-hybrydowy system odtwórczy EQUIA Forte HT.

### Szkolenie praktyczne:

- Odbudowa krok po kroku rozległych ubytków w zębach bocznych

## Estetyka łatwa do osiągnięcia z uniwersalnym materiałem kompozytowym

Przekonaj się jak łatwo za pomocą jednego odcienia G-aenial A'CHORD uzyskasz naturalnie wyglądające uzupełnienie w odcinku przednim.

### Szkolenie praktyczne:

- Odbudowa krok po kroku ubytków w odcinku przednim techniką uproszczoną i wielowarstwową

## Inteligentne rozwiązania z GC do częściowych uzupełnień pośrednich

Onlay i overlay od A do Z. Przekonaj się jakie to proste z naszymi rozwiązaniami! Preparacja, wybór materiału, wykańczanie i cementowanie częściowego uzupełnienia pośredniego. Zapytaj o karty techniczne do poszczególnych etapów procedury!

### Szkolenie praktyczne:

- Charakteryzacja i adhezyjne cementowanie pośredniego uzupełnienia częściowego za pomocą uniwersalnego cementu kompozytowego G-CEM ONE.

## Wprowadzenie do systemu implantologicznego GC Aadva

Jak dobrać implant do danego wskazania i jak "odnaleźć się" w kasecie chirurgicznej. Omówienie komponentów protetycznych wraz z ich wskazaniami. Technika flow Injection w implantologii.

### Szkolenie praktyczne:

- Preparacja łoża pod implant wraz z jego wprowadzeniem
- Przykręcenie poszczególnych elementów protetycznych
- Zamykanie i maskowanie kanałów w pracach przykręcanych

### Szkolenia

## A-La-Carte

### w gabinecie

Zdecyduj się na szkolenie praktyczne GC!

Dostosujemy je do potrzeb Twojej praktyki dentystycznej.

Nasze szkolenia praktyczne A-la-Carte oferują rozwiązania do szerokiej gamy codziennych wyzwań i są przeznaczone dla całego zespołu!

PRZYDATNE  
WSKAZÓWKI!

ELASTYCZNY  
czas trwania!

BEZPŁATNY  
UDZIAŁ!

### JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z Konsultantem GC, aby uzyskać więcej informacji lub napisz e-mail na adres: [info.poland@gc.dental](mailto:info.poland@gc.dental)

## Konsultanci GC

Nasi specjaliści ds. produktów są do Państwa dyspozycji i chętnie udzielą Państwu indywidualnej porady.



Tomasz Markowski  
SZCZECIN / POZNAŃ /  
GDAŃSK / TORUŃ / OLSZTYN  
M. +48 698 648 384  
Tomasz.Markowski@gc.dental  
Technika Dentystyczna



Magdalena Kujawska  
SZCZECIN / KOSZALIN  
M. +48 532 534 843  
Magdalena.Kujawska@gc.dental  
Stomatologia



Sebastian Lewandowski  
GDAŃSK / BYDGOSZCZ /  
TORUŃ  
M. +48 516 035 806  
Sebastian.Lewandowski@gc.dental  
Stomatologia / Implanty



Michał Kunda  
BIAŁYSTOK / OLSZTYN /  
BIAŁA PODLASKA  
M. +48 505 002 654  
Michał.Kunda@gc.dental  
Stomatologia



Krzysztof Szymański  
WARSZAWA / OSTROŁĘKA /  
EŁK / ŁOMŻA  
M. +48 790 269 100  
Krzysztof.Szymanski@gc.dental  
Stomatologia



Maria Glabisz  
POZNAŃ  
M. +48 605 212 615  
Maria.Glabisz@gc.dental  
Stomatologia



Rafał Rumak  
WARSZAWA / BIAŁYSTOK / ŁÓDŹ /  
LUBLIN / RZESZÓW / KRAKÓW /  
KIELCE  
M. +48 698 167 808  
Rafał.Rumak@gc.dental  
Technika Dentystyczna



Agnieszka Sobala  
ŁÓDŹ / PŁOCK / RADOM  
M. +48 666 857 080  
Agnieszka.Sobala@gc.dental  
Stomatologia



Magdalena Olko  
RZESZÓW / LUBLIN / ZAMOŚĆ  
M. +48 697 578 193  
Magdalena.Olko@gc.dental  
Stomatologia



Marcin Sidor  
WROCŁAW / OPOLE /  
ZIELONA GÓRA / KALISZ /  
KATOWICE / CZĘSTOCHOWA  
M. +48 508 278 585  
Marcin.Sidor@gc.dental  
Technika Dentystyczna



Joanna Łaban-Nanowska  
WROCŁAW / ZIELONA GÓRA  
M. +48 664 700 144  
Joanna.LabanNanowska@gc.dental  
Stomatologia



Dominika Ostrowska  
OPOLE / CZĘSTOCHOWA /  
GLIWICE / BYTOM  
M. +48 662 012 689  
Dominika.Ostrowska@gc.dental  
Stomatologia



Łukasz Ryński  
KATOWICE / TYCHY /  
BIELSKO-BIAŁA  
M. +48 733 338 381  
Lukasz.Rynski@gc.dental  
Stomatologia



Piotr Dąbrowski  
KRAKÓW / KIELCE / ZAKOPANE  
M. +48 505 402 204  
Piotr.Dabrowski@gc.dental  
Stomatologia / Implanty



Odwiedź naszą stronę internetową:  
<https://www.gc.dental/europe/pl-PL>



Odwiedź profil GC Poland na Facebook'u:  
<https://www.facebook.com/GCDentalPoland>



Odwiedź kanał GC Europe na YouTube:  
[www.youtube.com/user/GCEuropeProducts](http://www.youtube.com/user/GCEuropeProducts)



Odwiedź profil GC Poland na Instagramie:  
[https://www.instagram.com/gc\\_poland/](https://www.instagram.com/gc_poland/)