

EQUIA Forte™ HT

GLAS-HYBRID-BULK-FILL RESTAURATIONSSYSTEM



GC CORPORATION
TOKYO, JAPAN

Klinische Anleitung Schritt für Schritt



1
Verwendung von Vaseline
oder GC Cocoa Butter
innerhalb der Matrice



2
Verwendung anatomisch
geformter Keile für
bessere Anpassung und
Kontaktpunkte



3
Verwendung von dichten
Ringern aus Teilmatrizen-
systemen als Separator,
um gute Kontaktpunkte
zu gewährleisten



4
Optionaler Schritt:
Verwenden Sie
Cavity Conditioner
(10 Sek.) oder Dentin
Conditioner (20 Sek.)



5
Spülen und sanft
trocknen,
nicht austrocknen



6
Schütteln oder Klopfen,
um das Pulver zu lösen



7
Kolben drücken und
für 2 Sekunden gedrückt
halten



8
Für 10 Sekunden
anmischen.
Verarbeitungszeit
1'30" ab Beginn des
Anmischens



In den Kapselapplier einspannen. Die Kapsel zum Applizieren drücken.



UNVERZÜGLICH
innerhalb von 10
Sekunden ausdrücken



Stopfen und Formen.
Vermeiden Sie
Feuchtigkeitskontamina-
tion und Austrocknung



Stellen Sie sicher, dass
EQUIA Forte™ HT Fil
komplett abge bunden ist
und entfernen Sie den
Ring vorsichtig.
Verwenden Sie eine
Sonde, um die
Verbindung zwischen
Matrize und
EQUIA Forte™ HT Fil
zu trennen.



Finale Bearbeitung nach
2'30" nach Beginn des
Anmischens





Fertigstellung der
Restauration mit
Verwendung von
Equia Forte™ Coat.
Nicht mit Druckluft
trocknen



Lichthärtung für
20 Sekunden

Anmerkung: Schritte außer 1, 2, 3 und 12 sind für Klasse I und II üblich

Klasse II Anleitung zur Kavitäten-Präparation

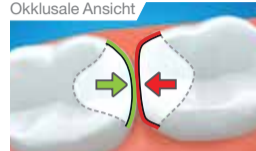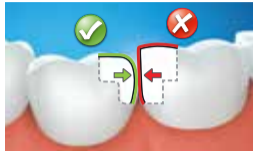

GC CORPORATION
TOKYO, JAPAN

4149196
261191TA