

*initial*<sup>TM</sup> Lustre Pastes ONE et Spectrum Stains  
Painting Solutions

L'art  
de peindre  
les céramiques.



# Peignez votre esthétique avec Initial™ de GC

GC offre aux utilisateurs de la gamme Initial les solutions céramiques à peindre les plus modernes et les plus esthétiques. En fonction du cas et des propriétés souhaitées, deux matériaux, Initial Lustre Pastes Family et Initial Spectrum Stains, fourniront le résultat attendu. Ils conviennent à une large gamme de CET, ce qui vous permet de travailler avec la gamme complète de céramiques GC Initial et presque tous les types de céramiques.


Les **Initial Lustre Pastes ONE**, céramiques uniques en 3D de GC, apportent fluorescence, profondeur et authenticité à tous vos précieux travaux... juste en peignant. Vous n'avez plus besoin de couches complexes ni de cycles de cuisson supplémentaires pour obtenir une vitalité inégalée et un glaçage naturel pour toutes vos restaurations.

Les **Initial Lustre Pastes GUM Shades** sont basées sur des particules céramiques non fluorescentes de couleur rose pour imiter parfaitement l'aspect des gencives naturelles. Une transition réaliste entre la couronne et la gencive est facilement réalisable.

Les **Initial Spectrum Stains** offrent un effet de coloration 2D et peuvent être utilisés pour une coloration interne et externe. Ils fourniront un résultat final très raffiné avec une surface brillante tout en préservant la texture.

**Lustre Pastes et Spectrum Stains** sont complémentaires. Dans certains cas, ils sont utilisés ensemble ; par exemple, les Spectrum Stains peuvent être ajoutés aux Lustre Pastes ONE ou aux poudres de stratification céramique.

Compatibilité des gammes Lustre Pastes & Spectrum Stains avec la gamme de céramiques Initial

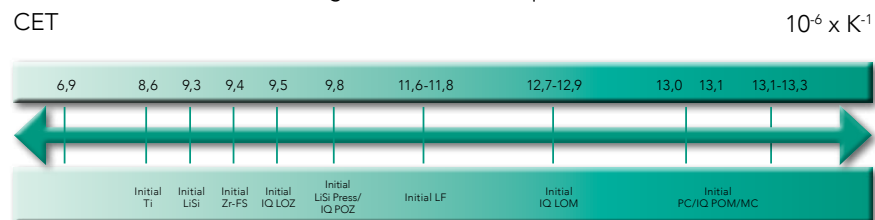

## Lustre Pastes ONE V-Shades

Avec les teintes « Body A-D », la teinte V requise peut être obtenue très facilement et en peu de temps. Avec les autres couleurs disponibles, vous pouvez caractériser davantage les restaurations pour un résultat final parfait.



Niveau de fluorescence optimal.  
Garantit l'aspect naturel des dents sous toutes les circonstances de lumière.




## Lustre Pastes NF GUM

Les 5 Lustre Paste uniques permettent une caractérisation individuelle pour créer - en toute harmonie - des teintes gingivales naturelles. Les 4 Gum Modifiers mélangeables permettent une créativité illimitée et la reproduction sans difficulté des cas les plus délicats.



## Spectrum Stains

Les Initial Spectrum Stains sont des colorants en poudre disponibles dans une variété de 20 couleurs qui renforcent l'esthétique de vos restaurations. Quel que soit le mode d'application, un résultat final très fin sera obtenu maintenant la texture de la surface et assurant un niveau de brillance optimal.

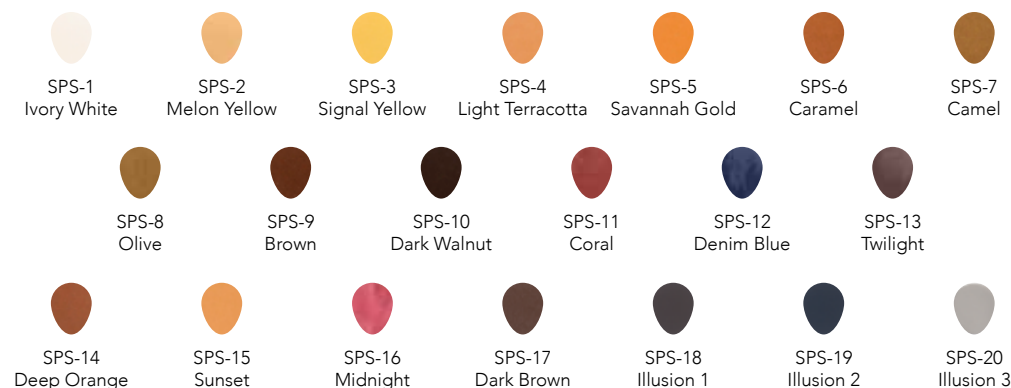

# Beauté profonde avec Initial Lustre Pastes ONE

## La finition parfaite de vos restaurations

Vous n'avez plus besoin de couches complexes ni de cycles de cuisson supplémentaires pour obtenir une vitalité inégalée et un glaçage naturel pour toutes vos restaurations. Avec Initial Lustre Pastes ONE, vous pouvez obtenir une fluorescence, profondeur de couleur et une translucidité naturelle... simplement en peignant.

Les pâtes Initial Lustre ONE sont basées sur un mélange spécial de fines particules de céramique. Les étapes restent identiques, quelle que soit la technique utilisée pour créer la base. En utilisant le liquide de dilution, la consistance optimale est maintenue jusqu'au bout.

La teinte V requise est créée par l'application du Lustre Pastes ONE " Body A-D ". Vous disposez du nécessaire pour créer des nuances V en peu de temps.

Pour une caractérisation améliorée, utilisez simplement les autres teintes disponibles... pour des résultats hautement esthétiques.



Base



Application du ONE Neutral Fluor



Application de Body Shades



Restauration finale colorée et lumineuse

## Modifications faciles

Il est facile de modifier vos éléments avec les Initial Lustre Pastes ONE.

Changer la couleur, la luminosité, la valeur de gris ou ajouter un brillant de surface n'a jamais été aussi simple !!



Luminosité





Couleur



Valeur de gris

## Les céramiques peintes permettent une représentation concrète des émotions les plus subtiles.

Les Lustre Pastes ONE à la fluorescence améliorée sont spécialement développées pour renforcer la fluorescence de vos restaurations monolithiques et garantir l'aspect naturel des dents dans toutes les circonstances lumineuses.

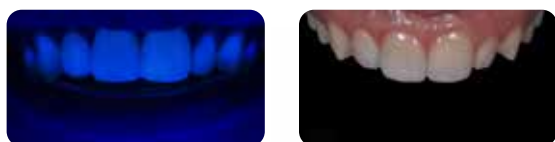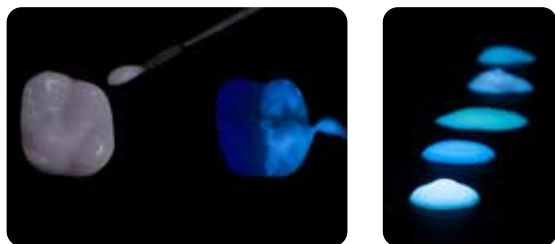

Lustre Enamel Effect – Opal  
Pâte hautement opalescente à utiliser dans la zone incisale.




## Ajoutez du caractère à vos restaurations one body...

La consistance unique garantit des modifications et une apparence homogène. La texture de surface attendue/douceur de la couche Lustre Pastes ONE peut être obtenue en vibrant doucement ou en condensant la restauration. Ni couches complexes ni cycles de cuisson supplémentaires ne sont nécessaires : c'est rapide, facile et sûr. Les pâtes sont prêtes à l'emploi avec une thixotropie fine, pour une application aisée et précise.



Des armatures anatomiques complètes en disilicate de lithium, telles que LiSi Press, peuvent être utilisées et individualisées avec Lustre Pastes ONE.

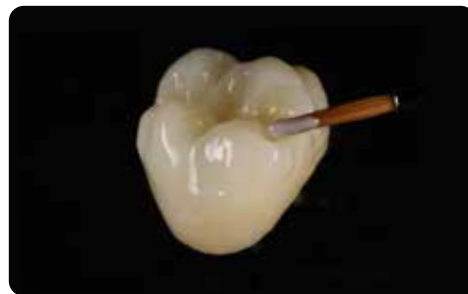

Vous recherchez un moyen d'ajouter de la vitalité à vos monolithiques en zirconie tels que Initial Zirconia Disk : les pâtes Lustre ONE sont la solution dans tous les cas.



## ... ou intégrez-les en couches pour plus de profondeur



Cut back



Application de Lustre Pastes ONE (+ cuisson)



Application de masses Opal/Incisal (+ cuisson)



Résultat final

Obtenez les résultats esthétiques les plus remarquables en utilisant les pâtes Initial Lustre Pastes ONE dans la technique cut back avec vos pièces pressées ou stratifiées. Après avoir peint avec Lustre Pastes ONE, les finitions sont réalisées avec la céramique de stratification spécifique GC Initial : CL-F pour une translucidité élevée et les masses Opal et Enamel pour les effets incisifs.



# Peignez votre esthétique rouge et blanche...

Deux coffrets, une approche.



Point de départ



Application des différentes teintes Initial Lustre Pastes ONE Gum



Caractérisation avec LP ONE V-Shades



Résultat final





... avec des transitions naturelles, même sur des armatures en zircone.



Le niveau de fluorescence optimal des Lustre Pastes ONE garantit l'aspect naturel des dents sous toutes les conditions de lumière et sont utilisés comme couche de couleur et de caractérisation en combinaison avec l'Initial SQIN dans la technique de micro-layering.

Avec la popularité croissante des restaurations en zircone et CAD/CAM, GC propose des solutions pour maintenir les mêmes normes esthétiques. Vos monolithiques auront un aspect naturel et dynamique avec Initial Lustre Paste ONE & NF GUM. Leur composition unique offre plus d'interaction avec le matériau céramique sous-jacent et agit optiquement comme les poudres de stratification céramique, renforçant ainsi l'effet 3D de votre restauration. La simplicité peut être belle !



# Élargissez vos possibilités de coloration avec Initial Spectrum Stains

Les Spectrum Initial Stains contiennent des pigments qui sont frittés dans une matrice de feldspath pour assurer la stabilité et permettre des résultats reproductibles et réguliers. Vous pouvez varier et jouer sans fin avec Initial Spectrum Stains. Utilisez-les pour la coloration interne et externe. Ils peuvent également être ajoutés aux masses céramiques ou aux pâtes Initial Lustre Pastes ONE pour augmenter encore les possibilités !

## Deux consistances préservant la texture


Les Initial Spectrum Stains peuvent être appliqués dans la consistance préférée par l'utilisateur, sous forme de pâte ou plus liquide. Quelle que soit la consistance utilisée, le résultat final sera le même : coloration et brillance avec une définition très fine, préservant la texture de surface de la restauration ; ils sont la contrepartie 2D des Initial Lustre Pastes ONE.



Couronne à texture fine prête à être glacée



Glaçage avec la consistance liquide ou pâte

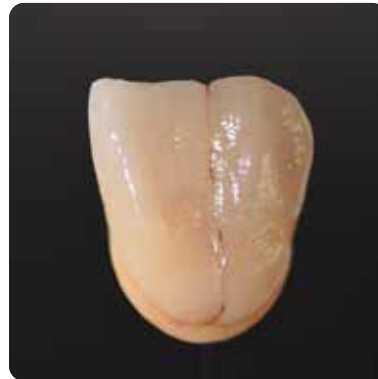

Après cuisson : coloration et glaçage préservant la fine texture



Coloration interne ...



... ou externe



# Solutions de peinture céramique 2D et 3D... de GC

## GC Initial Lustre Pastes ONE - V-Shades

- 4 Body Shades et 1 Neutral Fluo pour réaliser une restauration de la teinte V de la manière la plus simple
- 11 Effect Shades pour libérer votre potentiel artistique et peindre des taches blanches, des décalcifications, craquelures et lignes de fissures.

Composition du coffret :

1x Neutral (4g)  
 1x Neutral Fluo (4g)  
 1x Value (4g)  
 4x Body Shades (4x4g)  
 11x Enamel Effect Shades (11x4g)  
 1x Liquide de dilution (8ml)  
 1x Liquide de rafraîchissement (8ml)  
 1x plateau de mélange  
 2x pinceaux couleur  
 Tableau de correspondance des teintes  
 Manuel technique



## GC Initial Lustre Pastes NF - Gum Shades

- 5 pâtes gum colorées prêtes à l'emploi avec une thixotropie idéale pour une application facile et précise.
- 4 Gum Modifiers mélangeables permettant une créativité illimitée pour copier l'harmonie gingivale naturelle.

Composition du coffret :

5x Gum Shades (5x4g)  
 4x Stain Modifier pour LP NF (4x3g)  
 1 Liquide de dilution (8ml)  
 1 Liquide de rafraîchissement (8ml)  
 1 plateau de mélange  
 2 pinceaux couleur  
 Tableau de correspondance des teintes  
 Manuel technique



## GC Initial Spectrum Stains

- 20 poudres conférant un raffinement esthétique
- Deux consistances pour un résultat final pur préservant la texture et avec un niveau de brillance optimal.

Composition du coffret :

16x Initial Spectrum Stains SPS-1 - SPS-16 (16x3g)  
 1x Initial Spectrum Glaze Poudre GL (10g)  
 1x Initial Spectrum Glaze Liquide (25ml)  
 1x Initial Spectrum Glaze Paste Liquide (8ml)  
 1x Teintier Initial Spectrum Stains  
 Tableau de correspondance des teintes  
 Manuel technique

Disponible en recharges :

GC Initial Spectrum Glaze Powder GL-FLUO (10g)  
 GC Initial Spectrum Stains SPS-17 - SPS-20 (3g)



# *initial*<sup>TM</sup> Lustre Pastes ONE et Spectrum Stains

## Painting Solutions

Mentions obligatoires :

GC Initial Spectrum Stains, indications : colorants et glaze universels pour une caractérisation personnalisée des matériaux céramique.

GC Initial Lustre Paste NF : colorants céramique en 3D.

GC Initial Lustre Paste NF - Gum Shades : maquillants céramique en 3D pour reproduction gingivales

Dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé, non remboursés par la sécurité sociale. Classe IIa

Lire attentivement les instructions figurant dans le mode d'emploi avant toute utilisation.

Organisme certificateur : n°2797 - Distribués par GC France

**GC EUROPE N.V.**

Head Office  
Researchpark,  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven  
Tél. +32 16 74 10 00  
Fax. +32 16 40 48 32  
info.gce@gc.dental  
<http://www.gc.dental/europe>

**GC FRANCE s.a.s.**

8 rue Benjamin Franklin  
94370 Sucy en Brie Cedex  
Tél. +33.1.49.80.37.91  
Fax. +33.1.45.76.32.68  
info.france@gc.dental  
<https://www.gc.dental/europe/fr-FR>