

RELINE™ II Soft и RELINE™ II Extra Soft

Удобство и комфорт за активен живот



Открийте пълната гама от ребазираци материали на GC



	GC TISSUE CONDITIONER	GC RELINE II Extra Soft	GC RELINE II Soft	GC RELINE P/L
Материал	Акрилна пластмаса	А-Силикон	А-Силикон	Акрилна пластмаса (без MMA)
Индикации	<ul style="list-style-type: none"> Точки на натоварване При поставяне на имплант Меко ребазиране Покриване на тъкани след травма/хирургия Функционални отпечатъци 	<ul style="list-style-type: none"> Тонизиращ тъканите материал Чувствителна лигавица Точки на натоварване Нормализиране на възпалени тъкани 	<ul style="list-style-type: none"> При имплантиране Точки на натоварване Костни подмоли Намаляване на болката и повишаване на комфорта Дълготрайно запазване при липсващи опорни тъкани 	<ul style="list-style-type: none"> Дълготрайно ребазиране Неточни протези без травмирани тъкани Окончателна стъпка след предварително третиране с меки ребазираци материали и/или тъкани кондиционери
Време в устата	Дни/седмици/месец	Дни/седмици	Седмици/месеци	Месеци/години

Налични опаковки Reline II Soft и Extra Soft

Въвеждащ комплект

010260 **GC RELINE II Soft Въвеждаща опаковка:** EEP
 1x RELINE II Soft Картуш
 1x RELINE II Праймер за пластмаса
 1x RELINE II Фреза за изрязване
 1x RELINE II Киче за финиране
 1x RELINE II Отстранител на пластмаса

010263 **GC RELINE II Extra Soft Въвеждаща опаковка:** EEP
 1x RELINE II Extra Soft Картуш
 1x RELINE II Праймер за пластмаса
 1x RELINE II Фреза за изрязване
 1x RELINE II Киче за финиране
 1x RELINE II Отстранител на пластмаса

Допълнително

010266 GC RELINE II Soft Картуш, 48 ml EEP
 010269 GC RELINE II Extra Soft Картуш, 48 ml EEP
 010273 GC RELINE II Праймер за пластмаса, 10 ml
 010271 GC RELINE II Финиращ материал (Модификатор) 1-1 Опаковка, 2 x 9 ml
 GC RELINE II Отстранител на пластмаса, 5,5 ml
 010275 GC RELINE II Фреза за изрязване x 3
 010277 GC RELINE II Фреза за изрязване x 12
 010280 GC RELINE II Киче за финиране x 12
 010283 GC RELINE II Еднократна четка x 6

GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info@gceurope.com
 www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
 GCEEO Bulgaria
 BG - София 1202
 ул. "Будапеща" 92, ап. 4-3
 Тел. +359.2.983.30.30
 Факс. +359.2.858.31.37
 bulgaria@eoo.gceurope.com
 www.eoo.gceurope.com

Удобство и комфорт за активен живот



RELINE™ II Soft и
RELINE™ II Extra Soft
от GC

Мек, силиконов ребазирац
материал в картуши



Удобство, функция запазващи се при всякакви и комфорт, обстоятелства

Възпалението, екстракциите или поставянето на имплант променят меките и твърдите тъкани **и налагат адаптиране на протезите към тези нови, локални условия.**

Тъй като възрастните ни пациенти запазват здравето си и са активни по-дълго, а те искат да се усмихват, говорят и наслаждават на храненето през цялото време, дори когато носят протези.

Reline II Soft и Extra Soft от GC са разработени да създават мек слой между протезата и лигавицата, което **подпомага заздравяването, запазва комфорта и функцията** за седмици и до няколко месеца.



Снимки на Dr. Garcia-Baeza, Испания

Лесна за нансяне
силиконова основа
в картуши

Идеалният вискозитет на материала осигурява **разтичането му под напрежение, адаптирайки** се прекрасно към анатомичните детайли.

Подобрената му възможност за изрязване улеснява окончателното финариране на границите.



Подобренa възможност за изрязване за по-добро финариране на границите

Дълготраен
комфорт
и спокойствие за
Вашите пациенти

При Reline II, температурата не се покачва по време на втвърдяване, водейки до по-голям комфорт за пациентите.

Материалът **остава гладък, без мирис** и запазва своите **пространствена стабилност и еластичност** за седмици или месеци. **Резултатът? Надеждно и удобно решение** за пациенти с протези.



Запазване на границите Reline II финариращ материал

Здрава адхезия,
за лесна адаптация и
запазване

Подобреният състав на **GC Reline II Primer** за пластмасата осигурява **здрава връзка към протезата** за дълго време. Тази здрава адхезия, обаче, не намалява гъвкавостта му.

Може да **добавите материал до 3 месеца** след първото нанасяне, за да адаптирате протезата към промените на лигавицата и костта. **Новият GC Reline II отстранител за пластмасата** осигурява отстраняване на слоя ребазиращ материал и много бърза замяна.




**GC RELINE II
Праймер за
пластмаса**



**GC RELINE II
Отстранител
на пластмаса**

От издръжливост до еластичност:
изберете материала, който най-добре пасва на клиничната ситуация

Характеризирайки се с твърдост от 32 (Shore A), **GC RELINE™ II Extra Soft** е устойчив материал. Практически е полезен за **нормализиране** на възпалени тъкани и **подпомагане на тъканното заздравяване** след екстракция или поставяне на имплант. Остава на мястото си за **дни или седмици**.

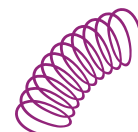

С твърдост 48 по Shore A, **GC RELINE™ II Soft** ще запази еластичността си във времето и действа като **абсорбатор на натоварването, разпределяйки го** при случаите с анатомични проблеми. Идеален е за ребазиране на **протези върху имплантна опора** след заздравителната фаза. Може да остане на място за **седмици или месеци**.



Първоначалната протеза за ребазиране, последвано от поставяне на 4 импланта.



Лесно нанасяне от картушата.



Отстраняване на излишците с ножица или скалпел. Изрежете с GC RELINE II ФРЕЗА ЗА ИЗРЯЗВАНЕ.



Освобождаване на зоната, подлежаща на ребазиране и награвяване на повърхността.



Поставяне на GC RELINE II (Extra) Soft. Време за работа 2'00".



Завършете с GC RELINE II КЕЧЕ ЗА ФИНАРИРАНЕ.



Нанасяне на GC RELINE II PRIMER върху определенa зона. Нежно подсушаване с въздух.



Поставяне на протезата в устата и оформяне с мускулите. Задържане на място за 5'00".



Ребазирана протеза.