



Bekväm passform för ett aktivt liv!



RELINTM II Soft &
RELINTM II Extra Soft
från GC

Mjukt silikonbaserat
rebaseringsmaterial
för direktteknik

GC

Bekväm passform och funktion som får patienten

Dagens patienter lever ett längre och mer aktivt liv än tidigare. De vill kunna le obehindrat, prata utan besvär och njuta av god mat oavsett ålder trots att de bär protes. Proteser, irritationer, tandextraktioner och implantat leder ovillkorligen till förändringar i tandens mjuk- och hårdvävnad.

Reline II Soft och Extra Soft från GC skapar ett mjukt skikt mellan proteserna och mukosan vilket gör att proteserna effektivt anpassas till nya lokala förhållanden. Detta underlättar läkning med bibehållen komfort och funktion i flera veckor och till och med upp till många månader.



Bilderna visas med tillstånd av Dr. Garcia-Baeza, Spanien

Lättapplicerad silikonliner för direktteknik

Materialets **viskositet** gör att det **flyter ut väl under tryck och formas perfekt** till alla anatomiska detaljer. Eftersom materialet är **lätt att trimma** underlättas den sista finisheringen av kantanslutningarna ytterligare.



Bättre trimningsegenskaper underlättar finishering av kantanslutningarna

Långvarig komfort och lindring för dina patienter

Med Reline II sker ingen värmestegring under stelning vilket ger en behagligare upplevelse för patienten. Materialet bibehåller sina **mjuka och luktfria egenskaper** och även sin **stabilitet och elasticitet** i flera veckor eller till och med månader. Resultatet? En hållbar och enkel lösning för protespatienter.



Kantanslutningarna skyddas ytterligare med finisheringsmaterialet Reline II

Stark vidhäftning men ändå enkelt att hantera

Den vidareutvecklade sammansättningen av GC Reline II Primer för akrylat ger stark vidhäftning till proteserna som håller längre. Den utmärkta vidhäftningen gör dock inte materialet mindre flexibelt.

Du kan addera material och göra anpassningar till följd av förändringar i mukosa och tandben upp till tre månader efter den första appliceringen. Och med nya Reline II Borttagningsmedel går det väldigt snabbt att avlägsna rebaseeringsskiktet och ersätta det med ett nytt.



GC RELINE II
Primer
för resin




GC RELINE II
Remover
för resin

att le varje dag

Mjukblivande och elastiskt: välj den produkt som är bäst lämpad för den kliniska situationen

GC RELINE II Extra Soft är ett tåligt material med en materialhårdhet på 32 (Shore A). Materialet är särskilt lämpligt för att normalisera irriterad vävnad och **främja vävnadsläkning** efter extraktion eller implantatkirurgi. Materialet kan sitta kvar i **dagar eller veckor**.

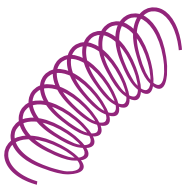

Tack vare en Shore A-hårdhet på 48 bibehåller GC RELINE II Soft sin elasticitet och **fördelar likt en stötdämpare belastningstrycket** i tid i händelse av anatomisk problematik. Materialet är även perfekt för rebasering av **implantatstödda proteser** efter avslutad läkningsfas. Materialet kan sitta kvar i **veckor eller månader**.



Enkel applicering och hantering under hela proceduren



Protes för rebasering efter placering av fyra implantat.



Rugga upp ytan i området som ska rebaseras.



Applicera RELINE II PRIMER på området som ska rebaseras. Luftblåstra försiktigt.



Enkel applicering med direktteknik.



Applicera GC RELINE II (Extra) Soft. Arbetstiden är 2 min.



Placera protesen i patientens mun och muskeltrimma. Låt sitta kvar i 5 min.



Avlägsna överskottsmaterial med skalpell eller sax. Trimma med RELINE II Trimningspets.



Finishera med RELINE II Finishingshjul.



Rebaserad protes.

RELINE™ II Soft & RELINE™ II Extra Soft

Bekväm passform för ett aktivt liv

Upptäck all-round familjen av Reline material från GC



	GC TISSUE CONDITIONER	GC RELINE II Extra Soft	GC RELINE II Soft	GC RELINE P/L
Material	Akrylat	A-silikon	A-silikon	Akrylat fritt från metylmetakrylat
Indikationer	<ul style="list-style-type: none"> Tryckställen Under implantatprocedurer Mjukrebasering Vävnadsläkning efter trauma/kirurgi Funktionsavtryck 	<ul style="list-style-type: none"> För tissue conditioning Sensibel slemhinna Tryckställen Normalisering av irriterad vävnad 	<ul style="list-style-type: none"> Implantat Tryckställen Vid underskär Smärtlindring och ökad patientkomfort Rebasering med lång hållbarhet i fall med avsaknad av stödvävnad 	<ul style="list-style-type: none"> Rebasering som håller över tiden Proteser med dålig passform utan vävnadsskada Sista steget efter förbehandling med mjukt rebaseringsmaterial och/eller tissue conditioning
Tid i munnen	Dagar/veckor/månader	Dagar/veckor	Veckor/månader	Månader/år

Reline II Soft & Extra Soft finns i följande förpackningar

Intro Kit

010259 **GC RELINE II Soft Intro Kit:**
 1x GC RELINE II patron (Soft eller Extra Soft)
 1x GC RELINE II Primer för akrylat
 1x GC RELINE II Trimningsspets
 1x GC RELINE II Finisheringshjul
 1x GC RELINE II Tillbehör

010262 **GC RELINE II Extra Soft Intro Kit:**
 1x GC RELINE II Extra Soft patron
 1x GC RELINE II Primer för resin
 1x GC RELINE II Trimningsspets
 1x GC RELINE II Finisheringshjul
 1x GC RELINE II Remover för resin

Refill

010265 GC RELINE II patron, 48 ml
 010268 GC RELINE II Extra Soft, patron, 48 ml
 010273 GC RELINE II Primer för akrylat, 10 ml
 010271 GC RELINE II Finisheringsmaterial (Modifier), 1-1 Pack, 2 fp à 9 ml
 010275 GC RELINE II Borttagningsmedel, 5,5 ml
 010277 GC RELINE II Trimningsspets 3 st.,
 010280 GC RELINE II Finisheringshjul 12 st.,
 010283 GC RELINE II Engångspensel 6 st

GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info@gceurope.com
 http://www.gceurope.com

GC NORDIC AB
 Box 703 96
 107 24 Stockholm
 Tel: 08 506 361 85
 info@nordic.gceurope.com
 http://nordic.gceurope.com

