


CDカートリッジ製品 使用上の注意事項について

CDカートリッジ製品は、CDディスクペンサー、又はCDディスクペンサーⅡへの着脱操作が不適切な場合、『CDカートリッジの破損』『適切な比率で押し出しできない』等の現象につながる恐れがあります。


特に下図に示す事項にご注意いただき、適切な操作方法でご使用ください。

【装着時の注意事項】

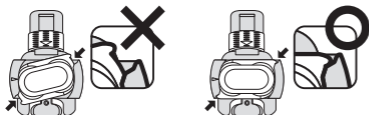

CDカートリッジは、確実にCDディスクペンサーに装着してください。

【取り外し時の注意事項】

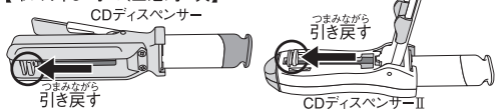

CDカートリッジの取り外し操作は、プッシュポールをCDディスクペンサー本体内に完全に引き戻してから行ってください。

【ペースト押し出し時の注意事項】

ペースト採取後、カートリッジのノズル先端部にペーストが付着したままキャップを閉めると、ノズル先端部とキャップの嵌合部にペーストが付着し、キャップが確実に閉められなくなる恐れがあり、その結果「左右のペーストが適切な比率で押し出しできない」、「製品本来の性能が発揮できない」等の現象につながる恐れがあります。

CDディスクペンサーを後ろに引きながら押し出し操作を行い、ペースト採取後にすり切り操作を行っていただければ、カートリッジのノズル先端部にペーストが付着しにくくなります。

後ろに引きながら押し出し

