



CDシステムは、CDシステム専用ディスペンサー（以下「CDディスペンサーⅢ」）とCDシステム専用カートリッジ（以下「カートリッジ」）から構成されます。

CDディスペンサーⅢは、カートリッジを装着することにより、必要な量だけ常に最適な比率で採取することを可能にしたツールです。



CDシステム専用ディスペンサー

CDディスペンサーⅢ  
CD DISPENSER III

ジーシー独自のCD（カートリッジデリバリー）システムに使用するディスペンサーです。「ジーセムONE neo」 「フジルーティング EX Plus」カートリッジに装着することにより、必要量を誰が操作しても最適な比率で、簡単に採取することができます。





エコストッパーを装着することで、より経済的にお使いいただけます。

エコストッパー


CDディスペンサーⅢ エコストッパー  
CD DISPENSER III ECOSTOPPER

CDディスペンサーⅢへのセットも簡単に1回の採取量が少量で経済的です。

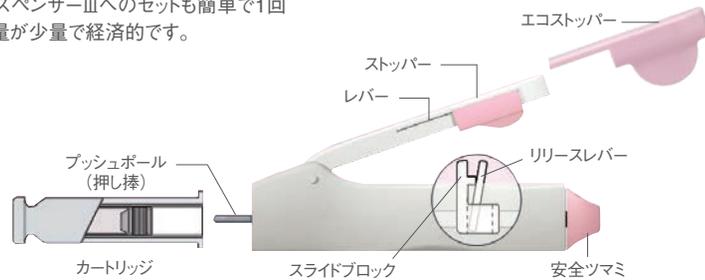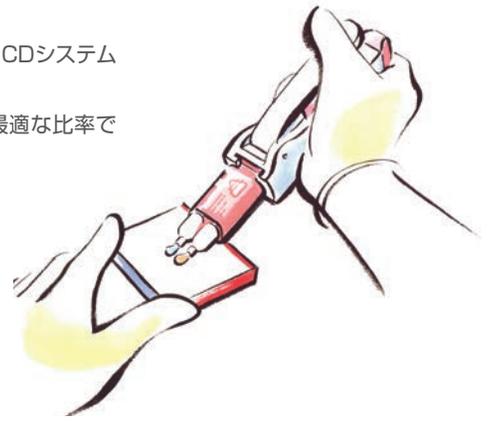

## CDディスペンサーⅢの使用法ポイント


- 1 カートリッジの着脱はプッシュボールが完全にCDディスペンサーⅢ内部に引き込まれた状態で行います。プッシュボールが本体から出ている場合は、レバーを開き、スライドブロックとリリースレバーを強くつまんだ状態で後端部まで引き戻してプッシュボールを完全に本体内へ引き込みます。

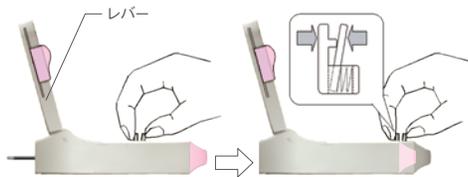

- 2 CDディスペンサーⅢにカートリッジを装着する際は、
  - ①CDディスペンサーⅢ嵌合部の▲マークとカートリッジの▲マークを合わせます。
  - ②▲マーク同士を合わせた点を中心にして、回転させながら装着します。（最後まで回ってきたことは、クリック感で確認できます。）カートリッジを外す場合は、この逆です。(fig.1)

- 3 カートリッジにキャップをしたまま、リリースレバーの付け根部分を押し、プッシュボールの先端を、カートリッジの中皿に突き当てます。リリースレバーのできるだけ下部を押すとスムーズにスライドできます。(fig.2)

- 4 CDディスペンサーⅢの「安全ツマミ」に刻印された矢印を上向きに90度回転させるとレバーが上がり、押し出し操作ができるようになります。(fig.3)  
(それ以外の位置では、レバーによる押し出し操作はできません。)

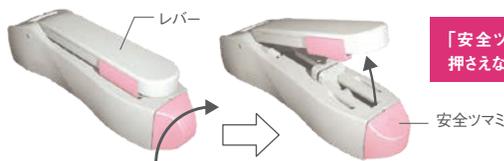

「安全ツマミ」を回す際には、レバーを押さなくてください。

- 5 カートリッジのキャップは、引き抜くように外します。この時、カートリッジの装着状態にズレのないことを確認してください。  
※ペース採取後は、しっかりとキャップを閉めてください。

- 6 CDディスペンサーⅢのレバーを押したまま、ペースを押し出し、練和紙にすり切り採取します。(fig.4)  
※ペース採取後は、しっかりとキャップを閉めてください。  
ストッパーをスライドさせ、位置を変えることにより、押し出し量を変えることができます。(fig.5)

