

# シルフィ

間接法用長期弾性裏装材（シリコーン系）

間接法で顎義歯の裏装を行う  
シリコーン系材料

保険適用外



Since 1921  
100 years of Quality in Dental



# シルフィ

顎顔面補綴装置のうち、口腔粘膜に接触し、口腔機能回復を目的とする部分を製作する、つまり顎義歯（上顎顎義歯、下顎顎義歯）を裏装するためのシリコン系材料です。間接法にのみ、ご使用いただけます。



硬化物の色調は半透明です。

## 症例によって 選べる2つの硬化時間

シルフィは、硬化時間の異なるレギュラーとファストをラインナップ。加熱により硬化時間を短縮することも可能です。

※硬化時間が長い場合、直接法用として口腔内で使用しないでください。

|       | 操作時間 | 硬化時間    |           |
|-------|------|---------|-----------|
|       |      | 室温(23℃) | 温水中(70℃)* |
| レギュラー | 約2時間 | 約1日     | 約30分      |
| ファスト  | 約1時間 | 約3時間    | 約15分      |

\*70℃に保ったお湯の中に入れた場合の硬化時間です。

## ハンドミックスタイプの シリコン系材料

A(カタリスト)とB(ベース)を重量比10:1で計量し、約60秒練和して使用します。



A10g、B1gで秤りを使用して計量

## 薄い部分も「ちぎれにくい」!

ジーシー独自のシリコン技術を応用し「やわらかさ」「のび」「ちぎれにくさ」を実現しました。



### 間接法用長期弾性裏装材(シリコン系)

## ジーシー シルフィ



種類●2種=レギュラー、ファスト

包装●1函:A(400g)1個、B(40g)1個

義歯床用長期弾性裏装材 ジーシー シルフィ  
管理医療機器 30600BZX00044000

※掲載情報とジーシー研究所の参考データは2024年6月現在のものです。  
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー  
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター  
お客様窓口 ☎0120-416480  
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)  
<https://www.gc.dental/japan/>

支店  
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333  
営業所  
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722  
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー  
公式アプリ



どちらもコチラのQRでOK!

推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。