

グレースフィル シリーズ U (ユニバーサルシェード)

● ゼロフロー ● ローフロー ● フロー

ナノハイブリッド充填用コンポジットレジン



グレースフィル シリーズ U(ユニバーサルシェード)

ジーシー独自の光透過性と色あいの最適化により
天然歯に自然と馴染む CR 充填が行えます。



16 シェードの人工歯に U (ユニバーサルシェード) を充填

充填部位

U(ユニバーサルシェード) が症例に合わせて3種類のフローから選択でき、診療効率がさらにアップ!



※写真は 1mL 仕様です。

グレースフィル ゼロフロー
U (ユニバーサルシェード)



※写真は 1mL 仕様です。

グレースフィル ローフロー
U (ユニバーサルシェード)



※写真は 1mL 仕様です。

グレースフィル フロー
U (ユニバーサルシェード)

包装●

1mLシリンジ単品: 1.7g(1mL)入シリンジ1本、フィリングチップニードルタイプ1個、フィリングチップエレファントニードル1個、フィリングチップ用キャップ1個
2mLシリンジ単品: 3.4g(2mL)入シリンジ1本、フィリングチップIIIプラスチック2個、フィリングチップIIIニードル1個、フィリングチップ用キャップ1個

ゼロフロー (I級窩洞)

Gracefil




術前

形成後

術後

簡単にツヤ出し、滑沢なレジン面が持続

ナノサイズの多角形フィラーを均一分散することにより、摩耗による表面フィラーの脱落が起こりにくく、また脱落しても表面の凹凸が小さいためツヤが維持されます。

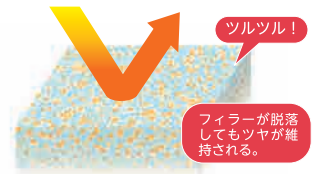

低吸水で着色しにくい




ベースレジンモノマーの改良により、吸水量を大幅に抑制。吸水が少ないため着色しにくく、レジン本来の色を長期的に維持します。



ゼロフロー(A2)充填

高い強度&優れた耐摩耗性

「FSCテクノロジー」により、表層修復にも使用できる高い強度と優れた耐摩耗性を実現しました。また、マトリックスレジンの進化により重合特性が高まり優れた破壊靱性を生む「粘り」も有しています。

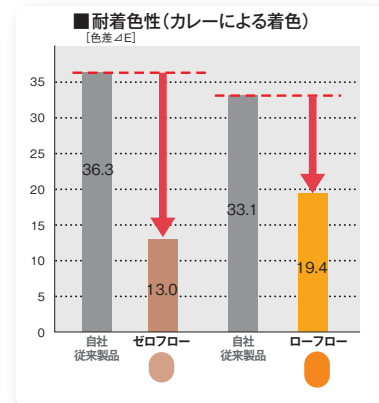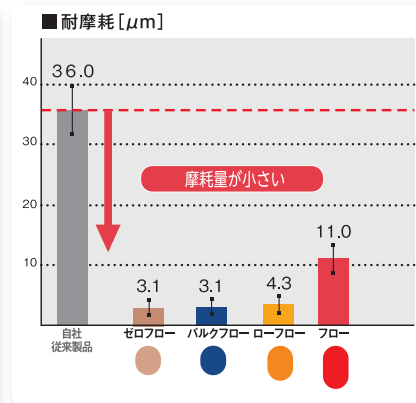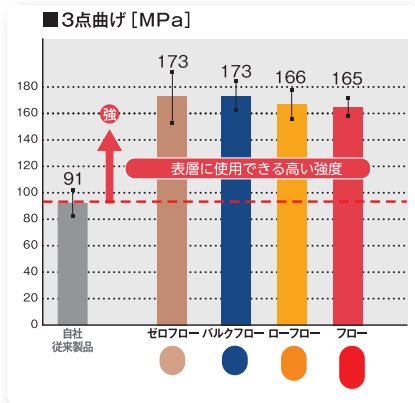

すべて
ジーシー研究所
測定データ

キレが良い

マトリックスレジンの進化により、キレが良く糸引きが生じにくいためストレスなくレジン修復が行えます。



糸引きが生じにくい

適応する窩洞修復方法	I級窩洞	II級窩洞	III級窩洞	IV級窩洞	V級窩洞	ライニング
ゼロフロー	◎*1	◎*1	大: ◎ 小: ○	小: ◎ ◎*2	深: ◎ 小・浅: ○	△
ローフロー	○	○*3	◎	○*2	深: ○ 小・浅: ◎	○
フロー	小・浅: ○	-	-	-	小・浅: ◎	◎

◎:最適 ○:適する △:使用できる -:使用する場合は十分に配慮
*1) レジンコンテクニックを使用 *2) 舌(口蓋)側のエナメル質のスキンに使用 *3) きわめて小さい窩洞

ゼロフロー

※写真は2mL仕様です。

ナノハイブリッド充填用コンポジットレジン
グレースフィル ゼロフロー
1mL色調
●18色=A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B1, B2, B3, C2, C3, U(ユニバーサル), A01, A02, A03, E1, E3, BW(フリーチングホワイト)
2mL色調●
9色=A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, U(ユニバーサル), A02, A03
1mL包装
●1包:(各色)シリンジ1本
●ダブルパック(A2, A3のみ):シリンジ2本
2mL包装
●1包:(各色)シリンジ1本

ローフロー

※写真は2mL仕様です。

ナノハイブリッド充填用コンポジットレジン
グレースフィル ローフロー
1mL色調
●19色=A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B1, B2, B3, C2, C3, U(ユニバーサル), A01, A02, A03, E1, E3, BW(フリーチングホワイト), W0(ホワイトオベーク)
2mL色調●
9色=A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, U(ユニバーサル), A02, A03
1mL包装
●1包:(各色)シリンジ1本
●ダブルパック(A2, A3のみ):シリンジ2本
2mL包装
●1包:(各色)シリンジ1本

フロー

※写真は2mL仕様です。

ナノハイブリッドフロアブルコンポジットレジン
グレースフィル フロー
1mL, 2mL色調●
9色=A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, U(ユニバーサル), C3, U(ユニバーサル), A01, A02, A03, E1, E3, BW(フリーチングホワイト), W0(ホワイトオベーク)
1mL包装
●1包:(各色)シリンジ1本
●ダブルパック(A2, A3のみ):シリンジ2本
2mL包装
●1包:(各色)シリンジ1本

バルクフロー

※写真は2mL仕様です。

歯科充填用コンポジットレジン管理医療機器
ジーシー
グレースフィル ゼロフロー 229AABZX00014000
ジーシー
グレースフィル ローフロー 229AABZX00013000
ジーシー
グレースフィル フロー 229AABZX00051000
ジーシー
グレースフィル バルクフロー 230AKBZX00066000

ナノハイブリッド一括充填用コンポジットレジン
グレースフィル バルクフロー
色調●2色=ユニバーサル(U), デンチン(D)
包装●
1包:(各色)シリンジ1本, フィリングチップⅢ
ニードル1個, フィリングチップⅢプラスチック2個, フィリングチップ用キャップ1個

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

※掲載情報とジーシー研究所の参考データは2024年8月現在のものです。
※製品の仕様および外觀は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

発売元 株式会社 ゴーシー / 製造販売元 株式会社 ゴーシーデンタルプロダクツ
東京都文京区本郷3丁目2番14号 愛知県春日井市鳥居松町2丁目285番地

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも
App Store からダウンロード Google Play からインストール
どちらもコチラのQRでOK!
推奨OSバージョンはiOS:14.0以上, Android:10.0以上です。

ジーシー 公式アプリ