

JMS

人と医療のあいだに…

GC



舌圧トレーニング用具

こども用

ペコぱんだ[®]



やわらかめ



ふつう



かため



Orarize[®]

対象年齢

3才以上

えんげ

こうおん



嚥下機能、構音機能は、舌の運動機能と深く関係しています。

ペコぱんだは、舌の筋力を強化するために開発された自主訓練用トレーニング用具です。

注)トレーニング中は、保護者がそばで見守り、使用してください。

■ペコぱんだの特長

お子様の状態によって選べる3タイプ

やわらかめ

舌のトレーニングに慣れましょう




ふつう

筋力アップを目指して次の硬さでトレーニングしましょう




かため


簡単におしつぶせるようになるまでがんばりましょう

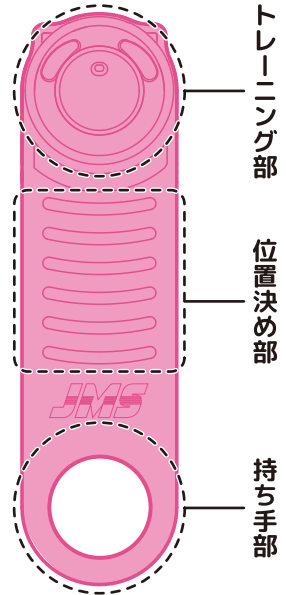


■ペコぱんだの使用方法

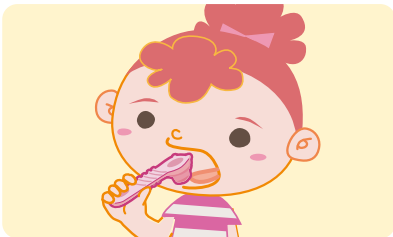

持ち手部の穴に指を入れてもち、トレーニング部を舌の方に向けて口の中に入れます。

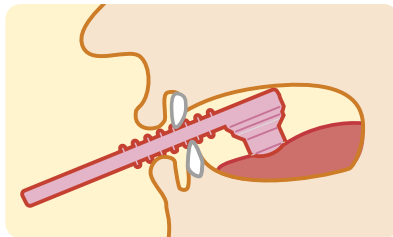

トレーニング部を舌の上に乗せ、位置決め部を前歯で軽く噛んで固定します。

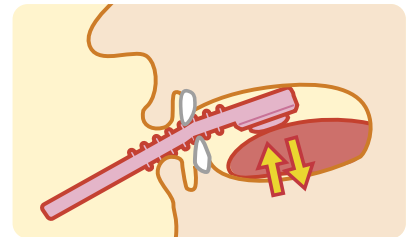

舌でトレーニング部を繰り返し押し上げ、押しつぶします。

■保護者による押しつぶしの確認方法

- トレーニング部を正しく押しつぶすとペコぱんだ全体に振動が伝わります。
- 保護者が押しつぶしを確認する場合は「位置決め部」や「持ち手部」を持ち、振動を確認してください。



非医療機器



舌圧トレーニング用具

ペコぱんだ (こども用)

種類●

3種=やわらかめ(ベリー)、ふつう(グレープ)、かため(ライム)

包装●1函:5個

包装・希望患者価格●1個=¥920(税込)

※掲載情報と価格は、2024年6月現在のものです。※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。※ペコぱんだは株式会社ジェイ・エム・エスの登録商標です。



販売元
株式会社ジェイ・エム・エス
東京都港区芝浦 1-2-1
お問い合わせ先
カスタマーサポートセンター
☎0120-923-107

販売代理店 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷3丁目2番14号
カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286

“お口の情報室”<http://orarize.com> こちらよりペコぱんだに関する情報をご欄いただけます。