

舌圧トレーニング用具

ペコぱんだ[®]

舌の筋力アップで、食生活を安全に楽しく



ブルーぱんだ

ピンクぱんだ

ムラサキぱんだ

グリーンぱんだ

オレンジぱんだ

イエローぱんだ

硬さの違う**6種類**をラインアップ



こんな症状はありませんか？

- 食事中によくむせる
- 食べ物がのどにつかえる感じがする

症状があり、嚥下障害が認められる場合は舌のトレーニングが必要です。



- 嚥下機能(食べ物を飲み込む働き)は、舌の運動機能と深く関係しています。
- スムーズに食べ物を飲み込んで安全に食事ができるよう、舌の筋力を強化する必要があります。

ペコぱんだは、舌の筋力を強化するために開発された自主訓練用トレーニング用具です。


●ペコぱんだの特長

硬さをえらべる


トレーニング部の硬さが6種類あり、患者さんの状態にきめ細かく合わせて選択できます。

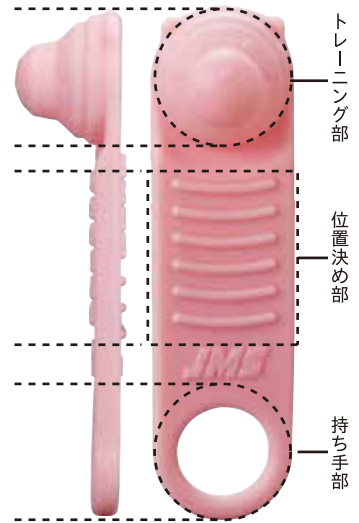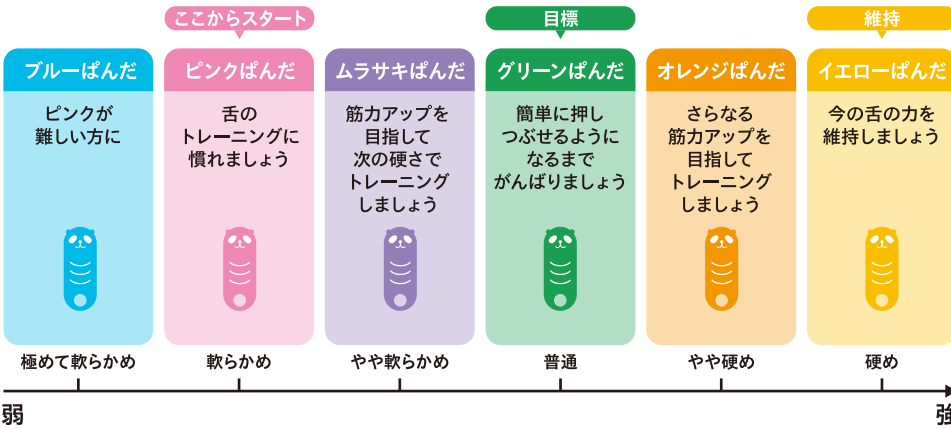


●ペコぱんだの使用方法

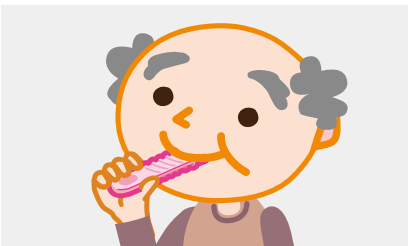

持ち手部の穴に指を入れてもち、トレーニング部を舌の方に向けて口の中に入れます。

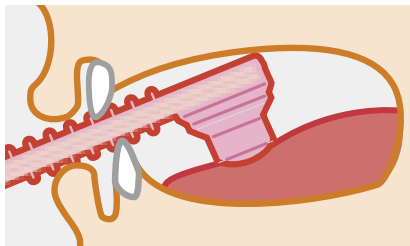

トレーニング部を舌の上に乗せ、位置決め部を前歯で軽く噛んで固定します。

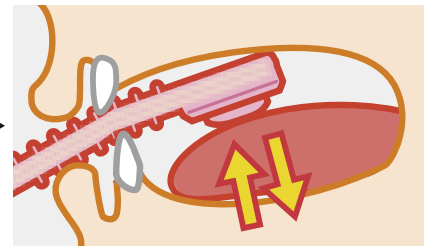

舌でトレーニング部を繰り返し押し上げ、押しつぶします。



SS:ブルー 極めて軟らかめ S:ピンク 軟らかめ MS:バイオレット やや軟らかめ M:グリーン 普通 MH:オレンジ やや硬め H:イエロー 硬め

舌圧トレーニング用具

ペコぱんだ

種類●
 6種=SS(ブルー/極めて軟らかめ)、S(ピンク/軟らかめ)、MS(バイオレット/やや軟らかめ)、M(グリーン/普通)、MH(オレンジ/やや硬め)、H(イエロー/硬め)
 包装●1函:5個
 包装・希望患者価格●
 1個=¥920(税込)



舌圧トレーニング用具

ペコぱんだ 基本セット (S/MS/M)

舌トレーニングの入門用に

種類●

1セット=S(ピンク/軟らかめ)、MS(バイオレット/やや軟らかめ)、M(グリーン/普通)
 包装●1函:3セット
 包装・希望患者価格●
 1セット=¥1,730(税込)

※掲載情報と価格は、2024年5月現在のものです。※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。※ペコぱんだは株式会社ジェイ・エム・エスの登録商標です。



販売元
株式会社 ジェイ・エム・エス
 東京都港区芝浦 1-2-1
 お問い合わせ先
 カスタマーサポートセンター
 ☎0120-923-107

販売代理店 **株式会社 ジーシー**
 東京都文京区本郷3丁目2番14号
カスタマーサービスセンター
 お客様窓口 ☎0120-416480
 受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
 ●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
 営業所
 ●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
 ●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286