

Catalogue N°7

Bagues



Bagues


Codification des bagues	145
Bagues molaires Sure-Snap Band	148
Bagues molaires A-Fit Band	149
Bagues prémolaires Sure-Snap Band	150

Bagues

Nous vous proposons deux types de bagues molaires de qualité exceptionnelle, tous deux fabriqués au Japon par Tomy® Inc.


Codification des bagues

Bagues molaires **Sure-Snap**. Composition de la référence

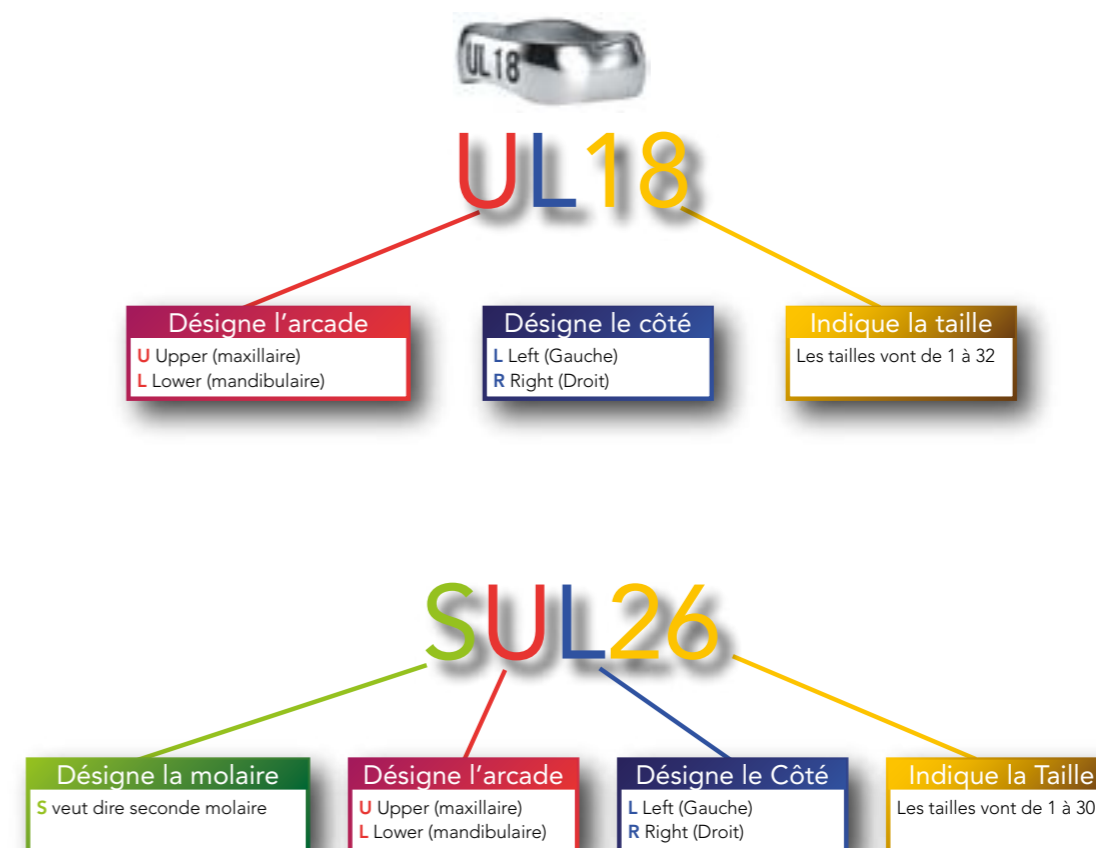




Bagues molaires **A-Fit**. Composition de la référence

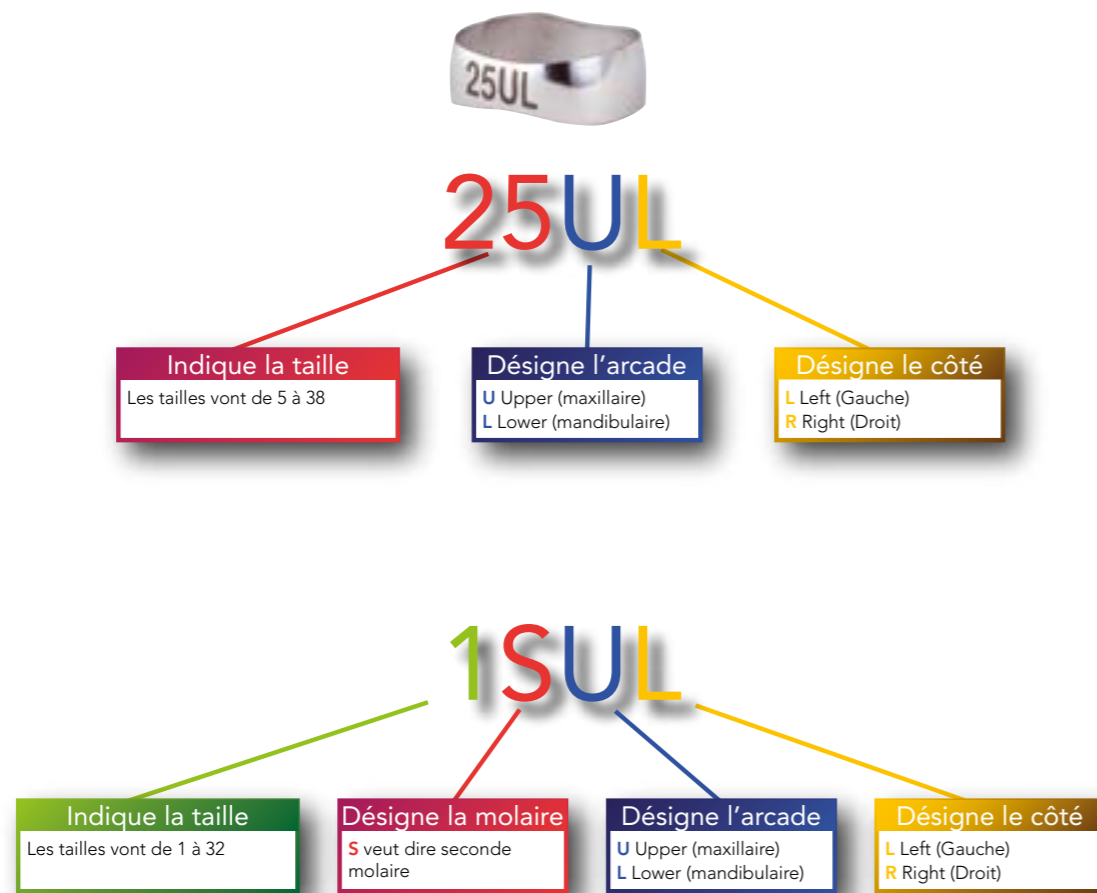

Bagues prémolaires **Sure-Snap**. Composition de la référence

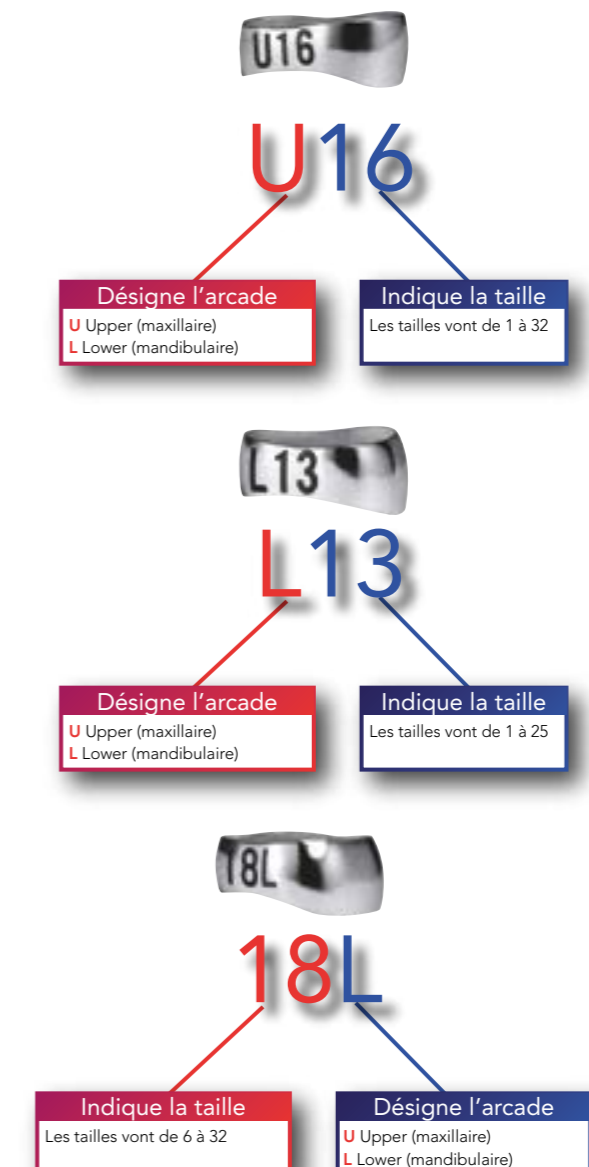



Bagues molaires Sure-Snap Band

L'alliage qui constitue la Sure-Snap rend cette bague dure et élastique à la fois. La différence d'épaisseur entre le bord occlusal et le bord gingival la rend :

- Résistante à la pression de l'enfoncement bague (bord occlusal)
- Suffisamment élastique pour passer le grand contour de la dent sans se déformer (bord gingival).

Vous disposez avec Sure-Snap, d'une forme anatomique pour chaque molaire, d'un marquage permanent bien lisible et d'un intrados traité par électro-soustraction pour une rétention unique.

Elles sont disponibles en 32 tailles pour les 1^{ères} molaires, et en 30 tailles pour les 2^{èmes} molaires.

Composition des Kits Sure Snap première molaire - Composition par dent: (SD, SG, ID, IG)

Taille	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
Starter												1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Intro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Standard	1	1	1	1	2	2	2	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	5	5	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	
Master	1	1	1	2	2	2	4	4	6	6	8	10	10	12	14	16	16	16	14	12	10	8	6	4	4	2	2	2	2	1	1	1	

Composition des Kits Sure Snap deuxième molaire - Composition par quadrant: (SD, SG, ID, IG)

Taille	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Starter												1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Intro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
Standard	1	1	1	2	2	2	2	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	5	5	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	
Master	1	1	1	2	2	2	4	4	6	6	8	10	10	12	14	16	16	16	16	12	10	8	6	4	4	2	2	2	2	1	1

Première molaire supérieure, bague nue

Kit Starter: 25 Bagues assorties, 13 Tailles
 Kit Intro: 50 Bagues assorties, 32 Tailles
 Kit Standard: 100 Bagues assorties, 32 Tailles
 Kit Master: 200 Bagues assorties, 32 Tailles

Première molaire inférieure, bague nue

Kit Starter: 25 Bagues assorties, 13 Tailles
 Kit Intro: 50 Bagues assorties, 32 Tailles
 Kit Standard: 100 Bagues assorties, 32 Tailles
 Kit Master: 200 Bagues assorties, 32 Tailles

Deuxième molaire supérieure, bague nue

Kit Starter: 25 Bagues assorties, 13 Tailles
 Kit Intro: 50 Bagues assorties, 30 Tailles
 Kit Standard: 100 Bagues assorties, 30 Tailles
 Kit Master: 200 Bagues assorties, 30 Tailles

Deuxième molaire inférieure, bague nue

Kit Starter: 25 Bagues assorties, 13 Tailles
 Kit Intro: 50 Bagues assorties, 30 Tailles
 Kit Standard: 100 Bagues assorties, 30 Tailles
 Kit Master: 200 Bagues assorties, 30 Tailles

Bagues molaires A-Fit Band

A-Fit Band a toutes les qualités de la Sure-Snap. Ce qui les différencie est une hauteur de couronne plus importante pour l'A-Fit Band et un choix de taille plus important dans les grands numéros. Identification des A-Fit Bands.

Composition des Kits A-Fit première molaire - Composition par dent: (SD, SG, ID, IG)

Taille	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Starter												1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Intro	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Standard	1	1	1	2	4	4	4	5	6	6	6	6	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Master	2	2	2	6	8	8	8	10	12	12	12	12	12	12	10	10	8	8	6	6	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

Composition des Kits A-Fit deuxième molaire - Composition par dent: (SD, SG, ID, IG)

Taille	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
Starter																																	
Intro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	
Standard	1	1	1	1	2	2	2	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	5	5	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	
Master	1	1	1	2	2	2	4	4	6	6	8	10	10	12	14	16	16	16	14	12	10	8	6	4	4	2	2	2	2	1	1	1	

Première molaire supérieure, bague nue

Kit Starter: 25 Bagues assorties, 13 Tailles
 Kit Intro: 50 Bagues assorties, 34 Tailles
 Kit Standard: 100 Bagues assorties, 34 Tailles
 Kit Master: 200 Bagues assorties, 34 Tailles

Première molaire inférieure, bague nue

Kit Starter: 50 Bagues assorties, 13 Tailles
 Kit Intro: 50 Bagues assorties, 34 Tailles
 Kit Standard: 100 Bagues assorties, 34 Tailles
 Kit Master: 200 Bagues assorties, 34 Tailles

Deuxième molaire supérieure, bague nue

Kit Starter: 25 Bagues assorties, 13 Tailles
 Kit Intro: 50 Bagues assorties, 32 Tailles
 Kit Standard: 100 Bagues assorties, 32 Tailles
 Kit Master: 200 Bagues assorties, 32 Tailles

Deuxième molaire inférieure, bague nue

Kit Starter: 50 Bagues assorties, 13 Tailles
 Kit Intro: 50 Bagues assorties, 32 Tailles
 Kit Standard: 100 Bagues assorties, 32 Tailles
 Kit Master: 200 Bagues assorties, 32 Tailles

Télécharger le formulaire de commande



Bagues prémolaires Sure-Snap Band

Ces bagues ont une qualité de fabrication identique à celle de nos bagues molaires.

Leur mise en place se fait par un mouvement de bascule, alternant une pression mésiale et distale. Elles sont disponibles en trois formes anatomiques :

- 1^{ère} prémolaire maxillaire (32 tailles)
- 1^{ère} prémolaire mandibulaire (25 tailles)
- 2nd prémolaire mandibulaire (27 tailles)

Grâce à leur facilité de mise en place, vous n'hésitez plus à les substituer aux brackets lors de rotations trop importantes ou de décollements intempestifs.

Composition des Kits Sure Snap prémolaires supérieures

Taille	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Starter						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
Intro	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	6	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Standard	2	2	2	2	2	4	6	6	6	6	6	8	8	10	12	14	14	14	12	10	8	8	6	6	6	4	4	4	2	2	2	2
Master	4	4	4	6	6	10	10	14	14	16	16	16	18	18	20	22	22	22	20	18	16	16	14	14	12	12	8	8	8	4	4	4

Composition des Kits Sure Snap 1^{ères} prémolaires inférieures

Taille	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Starter			2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4											
Intro	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	8	8	8	8	4	4	4	4	2	2	2	2	
Standard	2	2	2	2	4	4	8	8	8	8	10	12	12	18	18	18	18	10	8	8	8	4	4	2	2	
Master	4	4	4	6	6	8	8	14	14	18	18	24	24	36	36	36	36	24	24	16	16	8	8	4	4	

Composition des Kits Sure Snap 2^{èmes} prémolaires inférieures

Taille	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Starter						1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
Intro						2	2	2	2	2	2	4	4	4	6	6	8	8	8	6	6	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
Standard						2	2	2	4	4	6	6	6	8	10	12	14	16	16	16	14	12	10	8	6	6	6	4	4	2	2	2
Master						2	4	4	6	8	10	12	12	16	20	26	28	34	34	34	28	26	20	16	14	12	10	8	6	4	4	2

Prémolaire supérieure, bague nue

Kit Starter: 25 Bagues assorties, 22 Tailles

Kit Intro: 50 Bagues assorties, 32 Tailles

Kit Standard: 100 Bagues assorties, 32 Tailles

Kit Master: 200 Bagues assorties, 32 Tailles

1^{ère} Prémolaire inférieure, bague nue

Kit Starter: 25 Bagues assorties, 13 Tailles

Kit Intro: 50 Bagues assorties, 25 Tailles

Kit Standard: 100 Bagues assorties, 25 Tailles

Kit Master: 200 Bagues assorties, 25 Tailles

2^{ème} PM inférieure, bague nue

Kit Starter: 25 Bagues assorties, 27 Tailles

Kit Intro: 50 Bagues assorties, 27 Tailles

Kit Standard: 100 Bagues assorties, 27 Tailles

Kit Master: 200 Bagues assorties, 27 Tailles