



Tom, 14 Jahre alt
Behandelt mit **Legend**

Kieferorthopädische Behandlung: Warum?


Um Fehlstellungen im Gebiss zu korrigieren, für ein strahlendes Lächeln und die Erhaltung der Zähne bis ins hohe Alter.

Wie lange dauert eine kieferorthopädische Behandlung?

Abhängig von den erforderlichen Korrekturen kann eine Behandlung durchschnittlich 12 bis 36 Monate dauern. Um das gewünschte Ziel zu erreichen ist es wichtig, über den gesamten Zeitraum aktiv mitzuarbeiten.

Ziel

Mit der Auswahl von GC Orthodontics Produkten hat sich Ihr Behandler für hohe Qualität entschieden. Beeindruckende Ergebnisse und eine angenehme Behandlung sind die Folge.

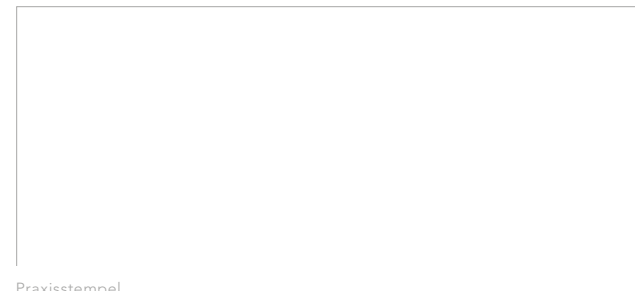

Praxisstempel

GC Orthodontics Europe GmbH
Tel +49 2338 801-888 · info.gco.germany@gc.dental



99-31G0-1200 · Rev03-05/2019



LEGEND

Standard Bracketsysteme
in Metall oder Rhodium



Experts in Orthodontics
www.gcorthodontics.eu



Mareike, 24 Jahre
Behandelt mit **Legend mini
Rhodium**

Wie funktioniert ein Standardbracketsystem?

Die drei Schlüsselkomponenten:

- **Das Halteelement** (Bracket) wird auf die Zahnoberfläche geklebt und führt den Zahn in seine optimale Position.
- **Der Drahtbogen** (Motor der Behandlungsapparatur) wird in die Brackets eingelegt und überträgt Zug- oder Druckkräfte auf den Zahn, bis dieser seine endgültige Stellung erreicht hat.
- **Der Clip** hält den Bogen im Bracket. Während der Behandlung werden Ligaturen und Bögen mehrfach ausgetauscht.



Hygiene: Während der Behandlung mit festen Zahnspangen ist eine perfekte Zahnpflege erforderlich. An den Brackets können vermehrt Belege haften bleiben, die das Risiko von Zahnfleischentzündungen und Entkalkungen erhöhen. Somit ist das Zähneputzen nach jeder Mahlzeit Pflicht.



LEGEND oder LEGEND Rhodium:

Auf Grund der unterschiedlichen Bracketarten können Sie die Behandlung wahlweise mit klassischen oder ästhetisch rhodinierten Metallbrackets durchführen lassen. Durch die rhodinierte Oberfläche des LEGEND RC Brackets reduziert sich die Lichtreflektion und ist somit unauffälliger.

Ihr Kieferorthopäde wird Sie bezüglich der zu Ihnen passenden Behandlungsmethode beraten.



Rh LEGEND mini Rhodium



LEGEND

Der Inhalt dieser Broschüre dient nur zur allgemeinen Information. Nur der Behandler kann eine qualifizierte Diagnose und den entsprechenden Therapieplan erstellen. Die Behandlungsdauer variiert von Patient zu Patient. **Fragen Sie Ihren Kieferorthopäden nach der für Sie besten Behandlungsmethode.**